

**HARTMANN**



Helps. Cares. Protects.

# Quando ci si aspetta la presenza di spore



## Bacillo® Oxy Tissues

- +** Impiego versatile:  
anche in caso di *C. difficile*  
in soli 15 minuti
- +** La coppia ideale:  
il complemento ideale a  
Dismozon® plus



**NOVITÀ**

Disinfezione delle superfici innovativa

# Bacillo<sup>®</sup> Oxy Tissues

Salviette disinfettanti pronte all'uso con ossigeno attivo nella pratica maxi confezione per la disinfezione delle superfici e dei dispositivi medici

**Requisiti igienici senza compromessi richiedono una risposta efficace, supportata dall'esperienza con *C. difficile*.**

Ogni volta che è prevedibile la presenza di agenti patogeni altamente infettivi o delle loro spore (ad es. *C. difficile*), sono richieste un'efficacia completa e una gestione eccellente.

**Bacillo<sup>®</sup> Oxy Tissues: azione sporicida rapida nelle stanze di isolamento, nelle unità di terapia intensiva, nelle aree in cui l'igiene è rilevante e nelle ambulanze**



CE 0482



## + Efficacia massima

Azione sporicida (non solo contro *C. difficile*), virucida, e micobattericida grazie a una formula innovativa, esclusivamente a base di perossido di idrogeno (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>).

## + Gestione semplice

Ingredienti selezionati permettono la disinfezione anche di superfici e dispositivi medici sensibili.

## + Profumazione gradevole

Privo di acido peracetico, coloranti o fragranze; viene utilizzato perossido di idrogeno (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>).

## + Uso intuitivo

Nessun rischio di confusione con le salviette standard (Flowpack) grazie all'utilizzo di un contenitore speciale con coperchio rosso.

Bacillo® Oxy Tissues


# Disinfezione più efficace

## Tempi di contatto brevi – garanzia di affidabilità

Nel contesto di tutte le norme europee rilevanti, Bacillo® Oxy Tissues offre tempi di contatto che garantiscono una routine di disinfezione pratica.

### Vantaggi

- + Elevati standard di sicurezza, anche contro *C. difficile*
- + Prodotto testato secondo tutti i metodi EN pertinenti
- + Superfici nuovamente utilizzabili in breve tempo

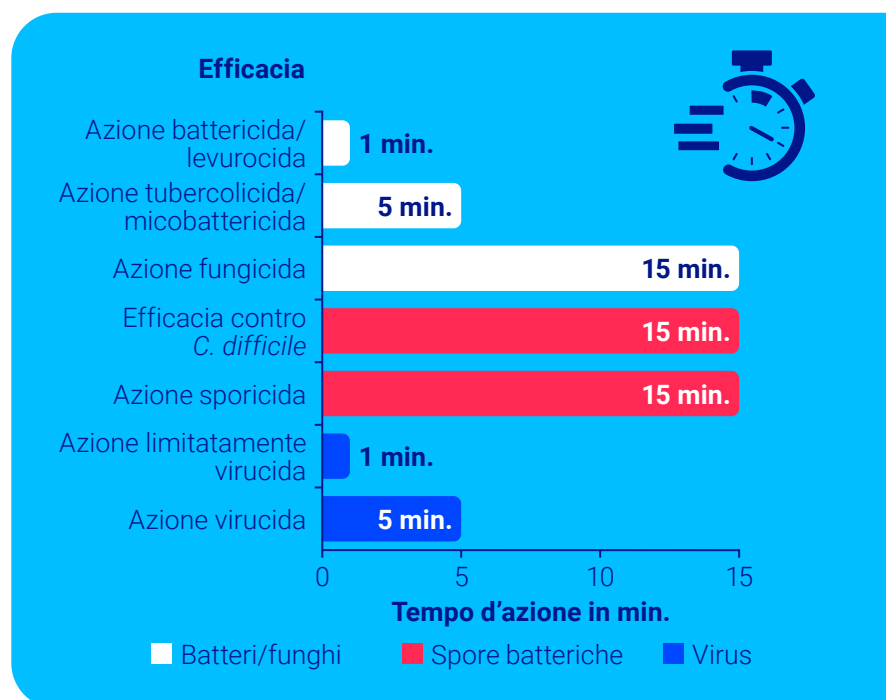

## Quando la disinfezione di routine raggiunge i suoi limiti

Bacillo® Oxy Tissues integrano la disinfezione di routine ogni volta che ci si aspetta la presenza di spore.



### Bacillo® 30 Sensitive Green Tissues:

Per la disinfezione quotidiana delle superfici – particolarmente delicate sui materiali, efficienti nell'uso quotidiano. Nella pratica confezione Flowpack.



### Bacillo® Oxy Tissues:

Per l'applicazione mirata su superfici e dispositivi medici – con spettro d'azione potenziato in caso di contaminazione da spore. Nella ben visibile maxi confezione.



\*(2 minuti norovirus)

# Per le superfici piccole Bacillo<sup>®</sup> Oxy Tissues, per le superfici grandi Dismozon<sup>®</sup> plus



Nome del prodotto	Contenuto conf.	Codice articolo
<b>Bacillo<sup>®</sup> Oxy Tissues</b>	Maxi confezione da 100 salviette Dimensioni 20 x 20 cm	981 982
<b>Dismozon<sup>®</sup> plus</b>	50 sacchetti da 16 g	981 257
	100 sacchetti da 16 g	981 187

*Disinfettante per superfici - utilizzare con cautela. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.*

Vi  
interessa?

Vi basterà scansionare il codice QR per maggiori informazioni sul concetto innovativo del prodotto.

Potete anche contattarci direttamente. Saremo anche lieti di fornirvi una panoramica della nostra ampia gamma di prodotti per la disinfezione delle superfici.

Saremo lieti di parlarne con voi!



Helps. Cares. Protects.

IVF HARTMANN AG  
Victor-von-Bruns-Str. 28  
CH-8212 Neuhausen

Tel.: +41 (0)52 674 31 11  
info@ivf.hartmann.info  
[www.ivf.hartmann.info](http://www.ivf.hartmann.info)