

HARTMANN



Bacillo[®] Zero Tissues

Lingettes de nettoyage et de désinfection à base d'acides organiques, entièrement efficaces et respectueuses des matériaux.



CE 0482

Domaines d'application / usage prévu

Désinfection nettoyante des dispositifs médicaux non invasifs. Désinfection nettoyante des dispositifs médicaux invasifs, cependant pas en tant que dernière étape du traitement.

Les lingettes Bacillo[®] Zero Tissues conviennent à une désinfection aisée et respectueuse des matériaux de :

surfaces conformément au Règlement relatif aux produits biocides (BPR), comme les :

- écrans et claviers ou panneaux de commande de terminaux de communication sensibles tels que les téléphones mobiles et les ordinateurs
- surfaces sensibles – par ex. en Makrolon[®], verre acrylique, polysulfone et similicuir – au sein d'établissements de santé

dispositifs médicaux et accessoires comme les :

- écrans et claviers ou panneaux de commande de dispositifs médicaux mobiles et stationnaires sensibles tels que les moniteurs de surveillance
- dispositifs médicaux sensibles non invasifs, comme des dispositifs de mammographie ou des lampes chirurgicales

Caractéristiques du produit

- Matériau en non-tissé 100% sans plastique
- Virucide en 2 minutes
- Exempt d'alcool, de composé d'ammonium quaternaire, d'agent oxydant, de parfum et de colorant
- >98,5% de composants organiques
- Formule brevetée – Complexe d'acides organiques
- Pas de symbole de danger – utilisable sans gants*
- Très bonne compatibilité avec les matériaux

Efficacité (charge élevée)		
Bactéries / champignons		
Bactéricide / levurocide	VAH	5 min
	EN 13727 / EN 13624 / EN 16615	2 min
Tuberculocide / mycobactéricide	EN 14348 / EN 16615	60 min
Virus		
Activité virucide limitée	EN 14476 / EN 16615**	2 min
Activité virucide limitée PLUS	EN 14476 / EN 16615**	2 min
Virucide	EN 14476 / EN 16615**	2 min


* Dans la mesure où la prévention des infections et la protection au travail le permettent

** Test à 4 champs modifié

Efficacité

Bactéricide, levurocide, tuberculocide, mycobactéricide, virucide limité (y comp. VHB, VIH, VHC), virucide limité PLUS, virucide.

Bacillo® Zero Tissues

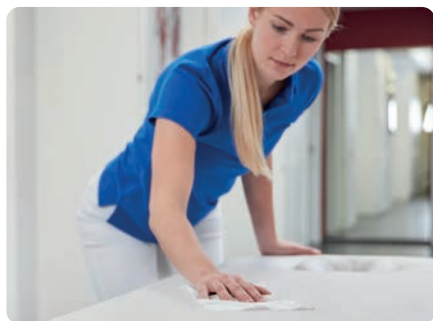

Utilisation

Essuyer les surfaces avec soin à l'aide des lingettes Bacillo® Zero Tissues. Veiller à un mouillage intégral afin de garantir une désinfection optimale. De par leur composition, les lingettes Bacillo® Zero Tissues peuvent aussi être utilisées sans recourir à des gants, dans la mesure où la prévention des infections et la protection au travail le permettent.

Après utilisation, éliminer les lingettes.

Pour éviter tout dessèchement précoce des lingettes, refermer l'emballage directement après usage.

Ne pas faire pénétrer de solution désinfectante à l'intérieur de dispositifs électriques. Prière de respecter les consignes du fabricant du dispositif.

A usage unique.

Procéder à un nettoyage intermédiaire en cas de changement de produit.

Durée de conservation

Dans un Flowpack ouvert et refermable :
3 mois.

Composition

(+)-acide tartrique à 5 mg/g et benzoate de sodium à 5 mg/g

Liste

Liste de désinfectants de la VAH et de l'IHO

Propriétés physico-chimiques

Les données se réfèrent à la solution d'imprégnation de Bacillo® Zero :

Point d'éclair

(EN ISO 3679) non inflammable

Masse volumique (20 °C) 1 g/cm³

pH (20 °C) : 2,1–2,4

Nom du produit	Contenu	Référence
Bacillo® Zero Tissues	Flowpack de 100 lingettes Dimensions 20 x 17 cm	981935
Support mural de Flowpack	1 support mural	981205
Support Flowpack flex	1 support	981899

Les recommandations concernant nos produits reposent sur des contrôles scientifiques et sont données au meilleur de nos connaissances. Des recommandations plus détaillées, par exemple en ce qui concerne la compatibilité avec les matériaux, ne sont possibles qu'au cas par cas. Nos recommandations sont données sans engagement et ne constituent pas une garantie. Elles n'excluent pas la vérification par l'utilisateur pour le procédé et les buts envisagés. Sur ce point, nous n'assumons aucune responsabilité. Cette dernière est régie par nos conditions générales de vente et de livraison.

Utiliser le désinfectant de surface avec précaution. Toujours lire l'étiquette et l'information produit avant utilisation.



Helps. Cares. Protects.

IVF HARTMANN AG

Victor-von-Bruns-Str. 28

CH-8212 Neuhausen

Tel. +41 (0)52 674 31 11

info@ivf.hartmann.info

www.ivf.hartmann.info