



Bacillo[®] Zero Tissues

Auf organischen Säuren basierende, umfangreich wirksame und materialschonende Reinigungs- und Desinfektionstücher.



Anwendungsgebiete / Zweckbestimmung

Reinigende Desinfektion von nicht invasiven Medizinprodukten. Reinigende Desinfektion von invasiven Medizinprodukten, nicht jedoch als letzter Schritt der Aufbereitung.

Bacillo[®] Zero Tissues eignen sich zur unkomplizierten materialschonenden Schnelldesinfektion von:

Flächen gem. Biozidproduktregistrierung (BPR), wie:

- Displays und Tastaturen bzw. Bedienfelder empfindlicher Kommunikationsgeräte, z.B. Mobiltelefone, Computer
- empfindliche Oberflächen – z.B. aus Makrolon[®], Acrylglas und Polysulfon sowie Kunstleder – in Einrichtungen des Gesundheitswesens

Medizinischen Geräten und Inventar, wie:

- Displays und Tastaturen bzw. Bedienfelder empfindlicher mobiler und stationärer medizinischer Geräte, z.B. Überwachungsmonitore
- empfindliche nicht invasive Medizinprodukte, z.B. Mammografiegeräte, OP-Lampen

Produkteigenschaften

- 100% plastikfreies Vliestuchmaterial
- Viruzid in 2 Minuten
- Frei von Alkoholen, quartären Ammoniumverbindungen, Oxidationsmitteln und von Parfüm- und Farbstoffen
- >98,5 % organische Inhaltsstoffe
- Patentierte Formulierung – organic acid complex
- Keine Gefahrstoffkennzeichnung – ohne Handschuhe anwendbar*
- Sehr gute Materialverträglichkeit

Wirksamkeiten (hohe Belastung)

Bakterien / Pilze

Bakterizid / levurozid	VAH	5 Min.
	EN 13727 / EN 13624 / EN 16615	2 Min.

Tuberkulozid / mykobakterizid	EN 14348 / EN 16615	60 Min.
-------------------------------	---------------------	---------

Viren

Begrenzt viruzid	EN 14476 / EN 16615**	2 Min.
------------------	-----------------------	--------

Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476 / EN 16615**	2 Min.
-----------------------	-----------------------	--------

Viruzid	EN 14476 / EN 16615**	2 Min.
---------	-----------------------	--------

* Sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen

** Modifizierter 4-Felder Test

Wirksamkeit

Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, viruzid.

Bacillo® Zero Tissues



Anwendung

Oberflächen mit den Bacillo® Zero Tissues sorgfältig abwischen. Auf vollständige Benetzung achten, damit der optimale Desinfektionserfolg gewährleistet ist. Aufgrund ihrer Zusammensetzung können die Bacillo® Zero Tissues auch ohne Handschuhe eingesetzt werden, sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen.

Nach Gebrauch Tissue der Abfallsorgung zuführen.

Um das vorzeitige Austrocknen der Tücher zu verhindern, Tücherverpackung direkt nach Gebrauch wieder verschliessen.

Keine Desinfektionsmittellösung in das Innere elektrischer Geräte gelangen lassen. Die Angaben des Geräteherstellers sind zu beachten.

Zur einmaligen Verwendung.

Bei Produktwechsel ist eine Zwischenreinigung durchzuführen.

Haltbarkeit

In geöffnetem und wieder fest verschlossenem Flowpack: 3 Monate.

Zusammensetzung

(+)-Weinsäure mit 5 mg/g und Natriumbenzoat mit 5 mg/g

Listung

VAH, IHO-Desinfektionsmittelliste

Chemisch-physikalische Daten

Die Angaben beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit Bacillo® Zero:

Flammpunkt
(DIN EN ISO 3679) nicht entflammbar
Dichte (20 °C) 1 g/cm³
pH-Wert (20 °C): 2,1-2,4

Produktname	Packungsinhalt	Artikelnummer
Bacillo® Zero Tissues	100 Tücher Flowpack Grösse 20 x 17 cm	981935
Flowpack Wandhalter	1 Wandhalter	981205
Flowpack-Halter flex	1 Halter	981899

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schliessen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Helps. Cares. Protects.

IVF HARTMANN AG
Victor-von-Brunns-Str. 28
CH-8212 Neuhausen
Tel. +41 (0)52 674 31 11

info@ivf.hartmann.info
www.ivf.hartmann.info