



BODE X-Wipes Safety Pack

Système distributeur à usage unique de lingettes en non-tissé offrant une observance élevée et une grande facilité d'utilisation.



Caractéristiques du produit

- Système distributeur de BODE X-Wipes avec rouleau de lingettes en non-tissé intégré et orifice de remplissage et de prélèvement breveté
- Flexibilité habituelle du système BODE X-Wipes combinée avec un niveau élevé de sécurité hygiénique, tout retraitement étant superflu
- Utilisation ciblée dans les domaines à haut risque
- Bonne stabilité
- Non-tissé en PET de haute qualité pour une libération optimale de l'agent actif
- Convient aux désinfectants de surface liquides* ainsi qu'à des produits sélectionnés de retraitement des instruments de HARTMANN

Domaines d'indication

Aide à l'application destinée au retraitement des dispositifs médicaux invasifs et non invasifs. A utiliser en combinaison avec des désinfectants de surface et d'instruments BODE (sauf la série Dismozon) et des détergents pour instruments. Destiné au nettoyage désinfectant des surfaces dans tous les domaines dans lesquels l'hygiène est importante au sein des hôpitaux, des EMS, des laboratoires et dans les domaines dans lesquels un maximum d'hygiène, de rentabilité et d'avantages pour les utilisateurs sont souhaités, par ex.:

- Sur les surfaces de travail
- Sur les brancards
- Sur les surfaces proches des patients et des résidents
- Pour les surfaces dans les chambres d'isolement
- Pour éviter les contaminations croisées dans les zones dans lesquelles

l'hygiène est d'une importance critique

- Dans les lieux d'intervention dans lesquels aucune source d'eau n'est disponible
- Partout là où un retraitement hygiénique des distributeurs de lingettes de non-tissé n'est pas possible

Utilisation

Le BODE X-Wipes Safety Pack peut être utilisé avec tous les produits liquides de désinfection des surfaces ainsi que des produits sélectionnés de retraitement des instruments de HARTMANN. Le système doit être rempli de 2 litres de solution désinfectante préparée. Lors de la préparation des solutions à partir de concentré (par ex. Mikrobac® forte, Kohrsolin® FF), il convient de choisir au minimum la concentration conseillée par l'Association allemande d'hygiène appliquée (VAH) avec une durée d'exposition d'une heure (ou moins).



* Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Dismozon® plus.

Lors de la préparation des solutions, veuillez toujours tenir compte des instructions d'utilisation et de sécurité ainsi que des informations de sécurité imprimées sur le produit. Les produits de désinfection rapide à base d'alcool (par ex. Bacillo® AF, Bacillo® 30 Sensitive Foam) sont prêts à l'emploi et ne doivent pas être dilués.

BODE X-Wipes Safety Pack

Remplissage du BODE X-Wipes Safety Pack



1



2



3

2,0 litres



4



5



6

28 j

Durée de vie:
28 jours

Enfilez des gants.

Dévissez le couvercle.

Ajoutez 2 litres de solution désinfectante.

Faites passer une lingette à travers l'orifice de prélèvement.

Revissez le couvercle du Safety Pack.

Aucun retraitement du BODE X-Wipes Safety Pack nécessaire

Dosage

Ajoutez 2 litres de solution préparée du produit désinfectant requis.

Composition

Non-tissé absorbant en polyester (60 g/m²).

Compatibilité avec les matériaux

Le BODE X-Wipes Safety Pack peut être utilisé avec tous les produits liquides de désinfection des surfaces de HARTMANN ainsi qu'avec les produits de retraitement des instruments suivants: Korsolex® extra, Bomix® plus et Bodedex® forte. Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Dismozon® plus.

En cas d'utilisation multiple: risque de contamination ainsi que de mélange de produits/lots.

Durée de vie

28 jours pour les désinfectants des surfaces

Désignation	Contenu	Référence
BODE X-Wipes Safety Pack	90 lingettes en rouleau de non-tissé dans un sac à fond plat	981 945

Les recommandations concernant nos produits reposent sur des contrôles scientifiques et sont données au meilleur de nos connaissances. Des recommandations plus détaillées, par exemple en ce qui concerne la compatibilité avec les matériaux, ne sont possibles qu'au cas par cas. Nos recommandations sont données sans engagement et ne constituent pas une garantie. Elles n'excluent pas la vérification par l'utilisateur pour le procédé et les buts envisagés. Sur ce point, nous n'assumons aucune responsabilité. Cette dernière est régie par nos conditions générales de vente et de livraison.

Utiliser le désinfectant de surface avec précaution. Toujours lire l'étiquette et l'information produit avant utilisation.

Helps. Cares. Protects.

IVF HARTMANN AG
Victor-von-Bruns-Str. 28
CH-8212 Neuhausen

Tel. +41 (0)52 674 31 11
info@ivf.hartmann.info
www.ivf.hartmann.info

(02.24)