

Handschuhe aus!

Wann medizinische Einmalhandschuhe nicht erforderlich sind


Wann nicht?

Handschuhe sind nicht zwingend nötig, wenn kein Risiko einer hohen Exposition mit Blut, Körperflüssigkeiten, Sekreten, Ausscheidungen oder kontaminierter Umgebung besteht.

Direkter Patientenkontakt



Otoskopie

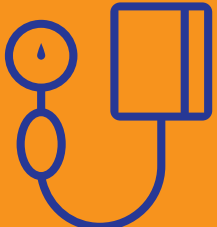

Messung von Blutdruck, Temperatur, Puls



Auskultation




Verabreichung i.d., s.c. und i.m. Injektionen (z. B. Impfen)



Patientenwaschung*

Indirekter Patientenkontakt

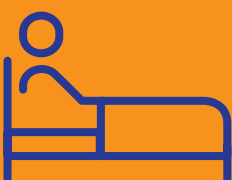

Bewegen von Patientenbetten



Bedienung elektronischer Geräte



Rollstuhl schieben



Anreichen von Essen/Getränken



Dokumentationsaufgaben

Warum nicht?

Unnötiges Handschuhtragen ...

1



... verschlechtert die Händehygiene Compliance und trägt so zur Verbreitung nosokomialer Infektionen bei.

2



... verschlechtert die zwischenmenschliche Beziehung.

3



... führt zu Hautschäden durch feuchte Kammern.

4



... erhöht das Aufkommen von überflüssigem Abfall.

Weitere Tätigkeiten:
Blutzuckermessung, Platzieren nicht-invasiver Beatmungsgeräte und der Sauerstoffkanüle, Patienten baden, ankleiden, waschen*, eincremen*, kämmen, rasieren, Patientenpositionierung, Pflege von Augen/Ohren (ohne Sekrete), Gefäßmanipulationen (ohne Blutfluss), Verteilen/Einsammeln von Essenstabletts, orale Medikamentengabe, Bettwäschewechsel/Bettenrichten u.a.
*ausgenommen Anogenitalregion sowie antimikrobielle Waschungen

Quellen:
1. RKI, Epid Bull 2024;10:6-9. 2. WHO (2009) Glove Use Information Leaflet.
3. Fuller et al. (2011) ICHE, 32(12):1194-9.



Handschuhe an!

Wann medizinische Einmalhandschuhe erforderlich sind

HARTMANN



Wann?

Handschuhe sind nötig, wenn das Risiko einer hohen Exposition mit Blut, Körperflüssigkeiten, Sekreten, Ausscheidungen oder kontaminierter Umgebung besteht.

Direkter Patientenkontakt



Blutentnahme



Ausscheidungen/
Körperflüssigkeiten



Kontakt mit Sekreten



Umgang mit
nicht-intakter Haut



Anwesenheit hoch
infektiöser Pathogene

Indirekter Patientenkontakt



Umgang mit
endokavitären Sonden



Reinigung/Desinfektion
kontaminierter Oberflächen*



Umgang mit infektiösem
Material/Chemikalien*



Umgang mit med. Abfall*

Hinweis: PPE-Verordnung beachten.

Warum?

Zum Schutz vor potenziell pathogenen Krankheitserregern


Bitte beachten:



Bei Keimverschleppung durch Perforation und/oder Kontamination der Handschuhe ist ein Wechsel der Handschuhe indiziert.



Handschuhtragen ersetzt nicht die Händedesinfektion.

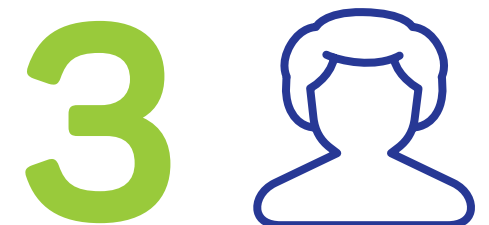

Handschuhkontakt mit dem eigenen Gesicht/Haar vermeiden.

Weitere Tätigkeiten:

Epidemie oder Notfallsituation, PVK-Anlage und -Entfernung, Absaugen nicht-geschlossener Endotrachealschlauch-Systeme u.a.

*Chemikalienbeständigkeit getestet nach EN ISO 374-1 und -2, EN ISO 374-4 und -5, EN 16523-1, ausgewiesen als Personal Protective Equipment nach PPE Regulation (EU) 216/425 und EN ISO 21420.

Quellen:

1. RKI, Epid Bull 2024;10:6-9. 2. WHO (2009) Glove Use Information Leaflet.