



BODE X-Wipes

Système distributeur universel de lingettes en non-tissé pour les désinfectants de surface liquides HARTMANN.



Domaines d'indication

Le système de lingettes en non-tissé à usage universel pour le nettoyage et la désinfection professionnels. Compatible avec tous les désinfectants de surface liquides HARTMANN à des concentrations avec une durée d'action d'une heure ou moins (selon la VAH), par ex.:

- Pour les surfaces de travail
- Pour les surfaces proches des patients et des résidents
- Désinfection des ambulances
- Partout là où un retraitement hygiénique des lingettes à usage multiple n'est pas possible

Caractéristiques du produit

- Protège les solutions contre les contaminations et l'évaporation
- Usage économique des lingettes et de la solution préparée
- Système de prélèvement coloré pour une meilleure différenciation des produits
- Non-tissé résistant
- Distributeur stable avec poignée de transport
- Solution utilisable 28 jours

Utilisation

Le système distributeur BODE X-Wipes convient à une utilisation avec des désinfectants de surface liquides HARTMANN à des concentrations avec une durée d'action d'une heure ou moins (selon la VAH).

Le distributeur BODE X-Wipes doit être rempli avec 2 litres de solution préparée (ou 1,2 litre pour le rouleau de 40 ou au moins 600 ml pour le rouleau de 30) du désinfectant de surface HARTMANN utilisé.

Veuillez respecter les instructions d'utilisation et de sécurité et les concentrations d'utilisation du produit concerné lors de la préparation des solutions.

Lingettes de non-tissé X-Wipes

Les rouleaux de non-tissé sont disponibles en version à 90, 40 ou 30 lingettes individuelles selon les besoins. Non-tissé absorbant en polyester (60 g/m²). Également disponibles en tant que rouleau de



non-tissé BODE X-Wipes basic avec une épaisseur de non-tissé plus fine de 40 g/m² (90 lingettes individuelles).

Dosage

Selon le rouleau de non-tissé utilisé, le distributeur de lingettes doit être rempli avec 2 litres de solution désinfectante (rouleau de 90), 1,2 litre (rouleau de 40) ou 600 ml (rouleau de 30 dans la boîte BODE X-Wipes).

Compatibilité

Le système distributeur BODE X-Wipes peut être utilisé avec les produits désinfectants HARTMANN suivants:

- Mikrobac® forte
- Kohrsolin® FF
- Bacillo® AF
- Bacillo® 30 Sensitive Foam

Durée de vie

Si le récipient est fermé correctement, la durée de vie du produit désinfectant de surface utilisé avec les lingettes BODE X-Wipes de HARTMANN est de 28 jours.

BODE X-Wipes

Deux possibilités de remplissage

Remplissage du distributeur de lingettes BODE X-Wipes avec le rouleau de non-tissé BODE X-Wipes en sachet



Enfilez des gants.



Placez le rouleau de non-tissé avec le sachet dans le distributeur propre et sec.



Versez la solution désinfectante dans le sachet et imprégnez le rouleau de non-tissé de manière homogène.



Faites passer une lingette en non-tissé à travers l'orifice de prélèvement. Jetez la première lingette.



Revisez le couvercle sur le distributeur. Annotez l'étiquette.



Jetez le film avec le couvercle.

Remplissage du distributeur de lingettes BODE X-Wipes avec le rouleau de non-tissé BODE X-Wipes standard



Enfilez des gants.



Insérez le rouleau de non-tissé.




Ajoutez de la solution de l'intérieur vers l'extérieur.



Faites passer une lingette en non-tissé à travers l'orifice de prélèvement et fermez le distributeur avec précaution. Jetez la première lingette.



Annotez l'étiquette.

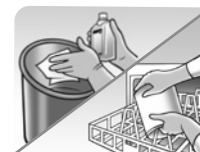

Désinfectez le distributeur de manière manuelle ou mécanique avant de le remplir à nouveau.

Désignation

Contenu

Référence

Distributeur BODE X-Wipes pour rouleau de non-tissé en sachet, pour les rouleaux de non-tissé de 40 et 90 lingettes

1 distributeur couvercle bleu	981 370
1 distributeur couvercle vert	981 372
1 distributeur couvercle rouge	981 371

Rouleau de 90 lingettes de non-tissé BODE X-Wipes en sachet avec système de couvercle

90 lingettes dimensions 200 x 300 mm	981 946
--------------------------------------	---------

Rouleau de non-tissé BODE X-Wipes

90 lingettes dimensions 200 x 300 mm	980 556
40 lingettes dimensions 200 x 300 mm	980 557
30 lingettes dimensions 200 x 300 mm	981 920

BODE X-Wipes basic

90 lingettes dimensions 200 x 300 mm	980 524
--------------------------------------	---------

Boîte BODE X-Wipes pour rouleau de 30

1 unité	980 610
---------	---------

Support mural BODE X-Wipes

1 unité	980 583
---------	---------

Etrier de sécurité BODE X-Wipes

1 unité	980 584
---------	---------

Les recommandations concernant nos produits reposent sur des contrôles scientifiques et sont données au meilleur de nos connaissances. Des recommandations plus détaillées, par exemple en ce qui concerne la compatibilité avec les matériaux, ne sont possibles qu'au cas par cas. Nos recommandations sont données sans engagement et ne constituent pas une garantie. Elles n'excluent pas la vérification par l'utilisateur pour le procédé et les buts envisagés. Sur ce point, nous n'assumons aucune responsabilité. Cette dernière est régie par nos conditions générales de vente et de livraison.

Utiliser le désinfectant de surface avec précaution. Toujours lire l'étiquette et l'information produit avant utilisation.



Helps. Cares. Protects.

IVF HARTMANN AG
Victor-von-Bruns-Str. 28
CH-8212 Neuhausen

Tel. +41 (0)52 674 31 11
info@ivf.hartmann.info
www.ivf.hartmann.info