

HARTMANN



Bacillol® Oxy Tissues

Gebrauchsfertige, sauerstoffaktive
Desinfektionstücher in der praktischen
Jumbo-Dose zur Desinfektion von
Oberflächen und Medizinprodukten

CE 0482



- Gebrauchsfertige Desinfektionstücher
- Sporizid wirksam, auch gegen *C. difficile*-Sporen
- Innovative Lösung auf Basis von Wasserstoffperoxid
- Gut materialverträglich, auch für sensible Oberflächen und Medizinprodukte geeignet
- Enthält keine Peressigsäure, Farb- oder Duftstoffe

Wirksamkeit	Prüfmethode	Belastung	Einwirkzeit
Bakterien/Pilze			
Bakterizidie/ Levurozidie	EN 13727 (VAH-zertifiziert) EN 13624 EN 16615	gering	1 Min.
Tuberkulozidie/ Mykobakterizidie	EN 14348 EN 16615	gering	5 Min.
Fungizidie	EN 13624 EN 16615	gering	15 Min.
Bakteriensporen			
Wirksam gegen <i>C. difficile</i>	EN 17126 EN 17846	gering	15 Min.
Sporizidie	EN 17126 EN 17846	gering	15 Min.
Viren			
Begrenzt viruzid	EN 14476	gering	1 Min.
Viruzidie	EN 14476	gering	5 Min.

Bacillol® Oxy Tissues: Wirksamkeit trifft auf Effizienz

- + Maximale Verlässlichkeit auch bei *C. difficile*
- + Angenehmer Geruch ohne Peressigsäure
- + Hochwertige, reissfeste Desinfektionstücher mit einer Reichweite von 1 m²
- + Keine Verwechslungsgefahr mit Routinedesinfektionsmitteln durch spezielle Dosenform
- + Kein Gefahrgut: unkomplizierte Logistik und Lagerung

100 Tücher,
20 x 20 cm,
in praktischer
Jumbo-Dose



Flächendesinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

www.ivf.hartmann.info