



BODE X-Wipes

Universell einsetzbares Vliestuchspendersystem für flüssige HARTMANN Flächen-Desinfektionsmittel.



Produkteigenschaften

- Schützt Anwendungslösungen vor Kontamination und Verdunsten
- Sparsam im Verbrauch von Tüchern und Anwendungslösung
- Farbiges Entnahmesystem zur besseren Produktunterscheidung
- Reissfestes Vlies
- Stabiler Spender mit Tragegriff
- Lösung 28 Tage verwendbar



Anwendungsgebiete

Das universell einsetzbare Vliestuchsystem für die professionelle Reinigung und Desinfektion. Geeignet für alle flüssigen HARTMANN Flächen-Desinfektionsmittel in Konzentrationen mit einer Einwirkzeit von 1 Stunde oder weniger (gem. VAH), z. B.:

- Für Arbeitsflächen
- Für patienten- und bewohnernahe Flächen
- Desinfektion von Rettungsfahrzeugen
- Überall dort, wo eine hygienische Aufbereitung von Mehrwegtüchern nicht möglich ist

Anwendung

Das BODE X-Wipes Spendersystem ist für den Einsatz mit flüssigen HARTMANN Flächen-Desinfektionsmitteln in Konzentrationen mit einer Einwirkzeit von einer Stunde oder kürzer (gem. VAH) geeignet. Der BODE X-Wipes Spender wird mit 2 Liter Anwendungslösung (bzw. 1,2 Liter bei der 40er Rolle oder mindestens 600 ml bei der 30er Rolle) des verwendeten HARTMANN Flächen-Desinfektionsmittels befüllt.

Bei der Herstellung der Anwendungslösungen sind die anwendungs- und sicherheitstechnischen Hinweise des jeweiligen Produktes und Einsatzkonzentrationen zu beachten.

X-Wipes Vliestücher

Je nach Bedarf sind Vliesrollen mit einem Umfang von 90, 40 oder 30 Einzeltüchern erhältlich. Saugfähiges Polyestervlies (60 g/m²). Auch als BODE X-Wipes basic Vliesrolle verfügbar, die mit 40 g/m² eine leichtere Vliesqualität bietet (90 Einzeltücher).

Dosierung

Entsprechend der eingesetzten Vliesrolle wird der Tuchspender mit 2 Liter Desinfektionsmittellösung (90er Rolle), 1,2 Liter (40er Rolle) oder 600 ml (30er Rolle in BODE X-Wipes Dose) befüllt.

Kompatibilität

Das BODE X-Wipes Spendersystem kann mit folgenden HARTMANN-Desinfektionsmitteln benutzt werden:

- Mikrobac® forte
- Kohrsolin® FF
- Bacillo® AF
- Bacillo® 30 Sensitive Foam

Standzeit

Bei ordnungsgemäsem Verschluss verfügen die in BODE X-Wipes eingesetzten Flächen-Desinfektionsmittel von HARTMANN über eine Standzeit von 28 Tagen.

BODE X-Wipes

Zwei Möglichkeiten der Befüllung

Befüllung des BODE X-Wipes Tuchspenders mit der BODE X-Wipes Vliesrolle im Folienbeutel



Ziehen Sie Handschuhe an.



Vliestuchrolle mit Folienbeutel in sauberen, trockenen Spender einsetzen.



Desinfektionslösung in den Folienbeutel geben, Vliestuchrolle gleichmässig benetzen.



Vliestuch durch Entnahme-Rund führen. Erstes Vliestuch verwerfen.



Schrauben Sie den Deckel am Spender wieder zu. Etikett beschriften.



Folie zusammen mit Deckel entsorgen.

Befüllung des BODE X-Wipes Tuchspenders mit der Standard BODE X-Wipes Vliesrolle



Ziehen Sie Handschuhe an.



Vliestuchrolle einsetzen.




Lösung von innen nach aussen zugeben.



Vliestuch durch Entnahme-Rund führen und Spender sorgfältig verschliessen. Erstes Vliestuch verwerfen.



Etikett beschriften.

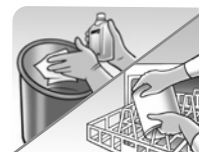

Spender vor der Wiederbefüllung manuell oder maschinell desinfizieren.

Produktname

Packungsinhalt

Artikelnummer

BODE X-Wipes Spender für Vliesrolle im Folienbeutel, für 40er und 90er Vliesrolle

1 Spender Deckelverschluss blau	981 370
1 Spender Deckelverschluss grün	981 372
1 Spender Deckelverschluss rot	981 371

BODE X-Wipes Vliesrolle 90 Tücher im Folienbeutel inkl. Deckelsystem

90 Tücher Grösse 200 x 300 mm	981 946
-------------------------------	---------

BODE X-Wipes Vliesrolle

90 Tücher Grösse 200 x 300 mm	980 556
40 Tücher Grösse 200 x 300 mm	980 557
30 Tücher Grösse 200 x 300 mm	981 920

BODE X-Wipes basic

90 Tücher Grösse 200 x 300 mm	980 524
-------------------------------	---------

BODE X-Wipes Dose für 30er Rolle

1 Stück	980 610
---------	---------

BODE X-Wipes Wandhalter

1 Stück	980 583
---------	---------

BODE X-Wipes Sicherungsbügel

1 Stück	980 584
---------	---------

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schliessen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insofern können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Hilft. Pflegt. Schützt.

IVF HARTMANN AG
Victor-von-Bruns-Str. 28
CH-8212 Neuhausen

Tel. +41 (0)52 674 31 11
info@ivf.hartmann.info
www.ivf.hartmann.info