

HARTMANN



Helps. Cares. Protects.

Efficace et durable

Bacillol® Zero Tissues



NOUVEAU


Nos exigences :

Efficacité et durabilité dès le début

Depuis toujours, l'objectif de nos produits de désinfection de surface est de protéger les humains et leur santé. Nous élargissons aujourd'hui cette exigence en intégrant la protection de notre environnement, en plus de la fonction de désinfection.

Notre solution consiste en un concept de produit complet et durable.

Les lingettes Bacillol® Zero Tissues incarnent la nouvelle génération de produits de désinfection de surface en garantissant dès le début une utilisation, une efficacité et un concept de conditionnement respectueux des humains et de l'environnement.

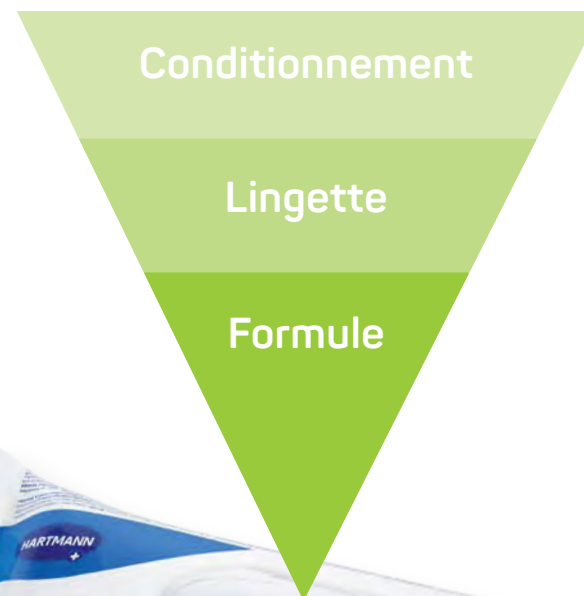

Durable à
tous les
niveaux.

NOUVEAU



Bacillo[®] Zero Tissues:

L'avenir durable de la
désinfection des surfaces

Durabilité

Efficacité

Compatibilité des matériaux

Facilité d'utilisation



L'innovation : complexe d'acides organiques

Le complexe de principes actifs breveté des lingettes Bacillo® Zero Tissues constitue une nouvelle dimension dans le domaine de la désinfection des surfaces. A base d'acides de fruits organiques, il garantit une désinfection complète et une utilisation durable dans le travail quotidien de nos utilisateurs.



Matière première renouvelable

A base d'acides de fruits organiques



Exempt de principes actifs courants

Sans CAQ, oxydant et alcool



Très bonne compatibilité avec les matériaux

Utilisable également sans soucis sur toutes les surfaces à proximité du patient et les écrans tactiles



Autorisé selon le RPB*

Confirmé par la procédure d'autorisation simplifiée du RPB

* Enregistré dans la procédure d'autorisation simplifiée du RPB dont l'objectif est de promouvoir l'utilisation de produits biocides moins nocifs pour l'environnement et la santé des humains et des animaux tout en étant efficaces contre les germes.

Efficacité	Méthode de contrôle	Charge	Durée d'action
Bactéries / champignons			
Bactéricide / levurocide	VAH	élevée	5 min
	EN 13727 / EN 13624 / EN 16615	élevée	2 min
Tuberculocide / mycobactéricide	EN 14348 / EN 16615	élevée	60 min
Virus			
Activité virucide limitée	EN 14476 / EN 16615*	élevée	2 min
Activité virucide limitée PLUS	EN 14476 / EN 16615*	élevée	2 min
Virucide	EN 14476 / EN 16615*	élevée	2 min

*Test modifié à 4 champs



Bactéricide, levurocide et virucide en 2 minutes

Prouvé dans le cadre d'un essai en suspension et d'un test pratique à 4 champs.

Plus de
98,5%
de composants
d'origine organique

Organique et respectueux des ressources

La formule, le matériau des lingettes et le concept d'emballage sont des indicateurs d'une lingette de désinfection réellement écologique. Les lingettes Bacillol® Zero Tissues marquent des points dans ce domaine grâce à des matières premières naturelles, un film et un carton entièrement recyclables, ainsi que des économies élevées de CO₂.

Tous ces critères font des lingettes Bacillol® Zero Tissues un produit durable à tous les niveaux.



Lingettes 100% sans plastique

Composées de matières premières renouvelables issues d'une sylviculture durable



Fibres des lingettes **biodégradables** et compostables*



Pas de symbole de danger

Exempt de substances préoccupantes



Empreinte carbone jusqu'à 75% inférieure

par rapport aux lingettes de désinfection de surface conventionnelles



Film d'emballage durable et 100% recyclable

* s'applique uniquement aux fibres des lingettes exemptes de solution d'imprégnation



Bacillol® Zero Tissues – autorisé selon le RDM** et le RPB

Aujourd'hui déjà, tous nos systèmes de qualité et de réglementation sont conformes au RDM. Nous garantissons ainsi à nos utilisateurs une livraison continue de produits sûrs et autorisés selon le RDM. Il en va de même pour les lingettes Bacillol® Zero Tissues.

En outre, les lingettes Bacillol® Zero Tissues sont autorisées en tant que biocides conformément au Règlement européen relatif aux produits biocides (RPB). En tant que produit à double usage, les lingettes Bacillol® Zero Tissues satisfont ainsi les toutes dernières normes réglementaires et soutiennent nos clients de manière sûre dans leur travail quotidien.

** Règlement relatif aux dispositifs médicaux.

Engagez-vous avec nous et **Bacillol® Zero Tissues** pour un avenir plus durable

- + Durable à tous les niveaux –**
Principe actif organique, lingettes 100% sans plastique, concept de conditionnement recyclable
- + Efficacité exhaustive –**
bactéricide, levurocide et virucide en 2 minutes
- + Très bonne compatibilité avec les matériaux –**
Utilisable également sans soucis sur toutes les surfaces à proximité du patient

Nom du produit	Contenu	Référence
Bacillol® Zero Tissues	Flowpack de 100 lingettes Dimensions 20 x 17 cm	981935
Support mural de Flowpack	1 support mural	981205
Support Flowpack flex	1 support	981899



CE 0482

NOUVEAU

*Utiliser le désinfectant de surface avec précaution.
Toujours lire l'étiquette et l'information produit
avant utilisation.*



Helps. Cares. Protects.

IVF HARTMANN AG
Victor-von-Bruns-Str. 28
CH-8212 Neuhausen
Tél. +41 (0)52 674 31 11

info@ivf.hartmann.info
www.ivf.hartmann.info