

HARTMANN



Bacillo® 30 Sensitive Tissues

Lingettes de nettoyage et de désinfection respectueuses des matériaux pour les surfaces sensibles.



CE 0482

Domaines d'indication

Les lingettes prêtes à l'emploi Bacillo® 30 Sensitive Green Tissues imprégnées de mousse Bacillo® 30 Sensitive Foam du Flowpack humidifient parfaitement les surfaces et agissent rapidement, même sur les surfaces sensibles.

Efficacité

Bactéricide, levuricide, tuberculocide, mycobactéricide, virucide limité (y compris VHB, VIH, VHC), virucide limité PLUS

Caractéristiques du produit

- Lingettes 100 % sans plastique
- Sans microplastiques
- Efficacité rapide avec de bonnes propriétés détergentes
- Particulièrement respectueux des matériaux, convient aussi aux matériaux sensibles comme: le polycarbonate (PC), le verre acrylique (PMMA) et le polysulfone
- Utilisable sans gants*
- Hypoallergénique et convient aux personnes allergiques – certifié



Efficacité	Méthode de contrôle	Charge	Durée d'action
Bactéries/champignons			
Bactéricide/levurocide	VAH / EN 16615 / EN 13727 / EN 13624	élevée	1 min
Tuberculocide/mycobactéricide	EN 14348	élevée	3 min
Virus			
Virucide limité (y comp. VHB, VIH, VHC)	DVV / RKI / EN 16777	élevée	1 min
Activité virucide limitée PLUS	EN 14476	élevée	30 min
Norovirus	EN 14476	élevée	2 min
Rotavirus	EN 14476	faible	1 min
Aliments/Industrie			
Bactéricide/levurocide	EN 13697	faible/élevée (20 °C)	1 min

* Dans la mesure où la prévention des infections et la protection au travail le permettent

** La plus importante entreprise d'inspection, de vérification, de contrôle et de certification au monde

Bacillo® 30 Sensitive Tissues



Utilisation

Essuyer les surfaces avec soin à l'aide des lingettes Bacillo® 30 Sensitive Green Tissues. Veiller à un mouillage intégral afin de garantir une désinfection optimale. De par leur composition, les lingettes Bacillo® 30 Sensitive Green Tissues peuvent aussi être utilisées sans recourir à des gants, dans la mesure où la protection contre les infections et la sécurité au travail le permettent. Ne pas utiliser pour la toilette cutanée. Après utilisation, éliminer les lingettes. Pour éviter tout dessèchement précoce des lingettes, refermer l'emballage directement après usage.

Durée de conservation après ouverture

Dans un Flowpack ouvert et refermable: 3 mois.

Composition

Principes actifs de la solution d'imprégnation:
éthanol 140 mg/g; propane-2-ol 100mg/g; propane-1-ol 60 mg/g; amines, N-C10-16-alkyltriméthylenedi-, produits de réaction avec l'acide chloracétique (n° CAS 139734-65-9) 2 mg/g

Liste

Liste de désinfectants de la VAH et de l'IHO

Propriétés physico-chimiques

Les données se réfèrent à la solution d'imprégnation de Bacillo® 30 Sensitive Foam:

Point d'éclair (DIN EN ISO 3679) 30 °C
Densité (20 °C) env. 0,95 g/cm³
pH (20 °C): env. 8

Désignation	Contenu	Référence
Bacillo® 30 Sensitive Green Tissues	Flowpack de 120 lingettes, dimensions 17 x 20 cm	981 943
Support mural de Flowpack	1 support mural	981 205
Support Flowpack flex	1 support	981 899

Les recommandations concernant nos produits reposent sur des contrôles scientifiques et sont données au meilleur de nos connaissances. Des recommandations plus détaillées, par exemple en ce qui concerne la compatibilité avec les matériaux, ne sont possibles qu'au cas par cas. Nos recommandations sont données sans engagement et ne constituent pas une garantie. Elles n'excluent pas la vérification par l'utilisateur pour le procédé et les buts envisagés. Sur ce point, nous n'assumons aucune responsabilité. Cette dernière est régie par nos conditions générales de vente et de livraison.

Utiliser le désinfectant de surface avec précaution. Toujours lire l'étiquette et l'information produit avant utilisation.



Aide. Soigne. Protège.

IVF HARTMANN AG
Victor-von-Bruns-Str. 28
CH-8212 Neuhausen

Tel. +41 (0)52 674 31 11
info@ivf.hartmann.info
www.ivf.hartmann.info