

Istruzioni per il prelievo del campione

Analisi: Screening prenatale Streptococco gr. B (GBS)	<u>Tamponi</u>
Ricerca (codice di accettazione): Screening prenatale Streptococco gr. B (31GBS) Sistema di raccolta/contenitore: LHB/LIM broth  eSwab (standard-tappo rosa) 	- Aprire la busta contenente il kit LHB/LIM broth o eSwab (tampone e provetta) - Raccogliere tramite il tampone il materiale - Svitare il tappo del contenitore Swab e inserire il tampone, con la porzione distale immersa nel liquido di trasporto - Spezzare l'applicatore a livello della linea colorata, facendo leva sull'orlo della provetta Riavvitare bene fino in fondo il tappo sulla provetta. Scrivere sull'etichetta della provetta il nome del paziente
Dove reperire il sistema di raccolta/contenitore: <u>Pazienti esterni:</u> Centri prelievo - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige <u>Reparti e ambulatori ospedalieri:</u> tramite la farmacia ospedaliera Dove consegnare dopo la raccolta: in qualsiasi Centro prelievo dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Per orari di apertura si veda sito https://www.asdaa.it/it/distretti-sanitari.asp Quando: il prima possibile; nel caso si rendesse necessario, il campione può essere conservato in frigorifero per <u>non più di 24 ore</u> (non congelare!).	 IMPORTANTE: per il prelievo di materiale dell'apparato genitourinario per le altre ricerche (p.e. screening molecolari ecc.) utilizzare i contenitori specifici!