

Istruzioni per il prelievo del campione

Analisi: esami colturali su espettorato

Ricerca (codice di accettazione):

- Coltura materiali respiratori (31RESP) (incluso esame microscopico diretto-Gram)

Sistema di raccolta/contenitore:

- **Kit SputEm** (provetta sterile con imbuto per la raccolta facilitata)



Dove reperire il sistema di raccolta/contenitore:

- Pazienti esterni: Centri prelievo - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
- Reparti e ambulatori ospedalieri: tramite la farmacia ospedaliera


Dove consegnare dopo la raccolta: in qualsiasi Centro prelievo dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Per orari di apertura si veda sito <https://www.asdaa.it/it/distretti-sanitari.asp>

Quando: il prima possibile; nel caso si rendesse necessario, il campione può essere conservato in frigorifero per non più di 24 ore (non congelare!).

Istruzioni prima della raccolta del materiale:

Raccogliere l'espettorato lontano dall'assunzione di cibo

Rimuovere sempre eventuali protesi dentarie
 Grattare gentilmente con spazzolino da denti o con tampone umido la mucosa interna delle guance, le gengive o la lingua
 Sciacquare il cavo orale con acqua prima della raccolta del campione
 Espettorare nell'imbuto del contenitore SputEm (vedi istruzioni a lato)
 Raccogliere almeno 1 ml di campione
 Evitare di introdurre materiale salivare nel contenitore per la raccolta

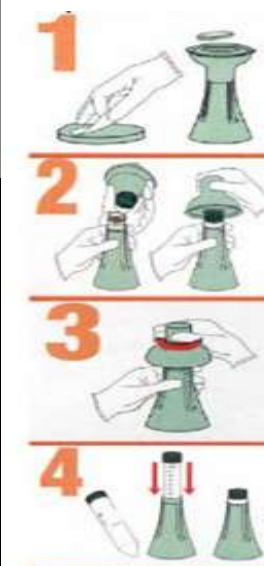

**Espettorato:
Prima della raccolta del materiale:**

- Utilizzare solo con involucro integro; aprire l'involucro ed estrarre il contenitore.
- Compilare l'etichetta sul tappino con i dati del paziente

Istruzioni per la raccolta del materiale:

- Aprire il coperchio grande dell'imbuto (non quello dell'etichetta) Non toccare l'interno dell'imbuto.
- Espettorare all'interno dell'imbuto affinché il materiale venga raccolto nella provetta sottostante.
- Richiudere il coperchio subito dopo la raccolta.

Dopo la raccolta del materiale:

- Togliere il coperchietto con l'etichetta, senza toccare il tappo verde scuro all'interno.
- Staccare la parte superiore dell'imbuto e capovolgerla affinché il tappo verde scuro si avviti sulla provetta che vedrete una volta tolto.
- Avvitare bene sulla provetta, eliminare quindi l'imbuto ed assicurarsi che la provetta sia chiusa bene.
- Attaccare l'etichetta compilata

sulla provetta sfilandola dal supporto, consegnare il campione il prima possibile.