

Fattore reumatoide nel plasma			
Informazioni generali			
Codice accettazione	119040		
Indicazioni cliniche [RIF.1]	Sospetto e diagnosi differenziale di artrite reumatoide		
Preparazione del paziente	Digiuno		
Richiedibile in urgenza (Valido solo per pazienti interni)	No (richiedibile nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 16:00)		
Dove effettuare il prelievo per pazienti esterni	Presso il centro prelievi del laboratorio centrale di patologia clinica di Bolzano In tutti i distretti dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige		
Esecuzione	Giornaliera		
Tempo di refertazione per pazienti esterni	2 giorni		
Preanalitica			
Tipo di campione	Plasma Li-eparina		
Tipo provetta	Tappo verde con inserto giallo 3,5 ml		
Trasporto del campione	A temperatura ambiente		
Trattamento del campione in laboratorio	Centrifugare entro 2h a temperatura ambiente		
Criteri per la non accettabilità del campione	Emolisi, coagulato, volume insufficiente, non corretta identificazione del paziente		
Stoccaggio del campione dopo l'analisi	7 giorni a 2-8°C		
Possibilità di richiesta su campione già processato	A seconda della stabilità del campione per il periodo di stoccaggio		
Indicazioni tecniche			
Misurando	Concentrazione plasmatica del fattore reumatoide nel plasma Li-eparina		
Metodo [RIF.2]	Test immunoturbidimetrico		
Range di riferimento [RIF.2]	<14 UI/ml		
Stabilità del campione [RIF.3]	18-22°C: 1g	2-8°C:8gg	-20°C: 90gg
Tempo di emivita dell'analita	ND		
Variabilità analitica (%) [RIF.4]	<1,82		
Variabilità biologica intraindividuale (%) [RIF.5]	8,5		
Differenza critica (%) [RIF.6]	24,09		
Incertezza di misura (U _m) omogeneo [RIF.4]	Livello 1 da circa 22,10 UI/ml: U _m 1,32 UI/ml Livello 2 da circa 48,61 UI/ml: U _m 2,14 UI/ml Dati estratti da Unity Real Time (Bio-Rad) nel mese di dicembre 2020 (periodo: ultimi 6 mesi)		
Interferenze [RIF.2]	Vedi foglietto illustrativo		

Significatività clinica	
Valori elevati [RIF.1]	• Artrite reumatoide • Endocardite batterica subacuta • Tubercolosi • Malattia di Lyme • Sifilide • Rosolia • Mononucleosi • Citomegalovirus • Epatite B e C • Sindrome di Sjörger • Crioglobulinemia • Tiroidite Hashimoto • Lupus eritematoso sistemico • Sclerodermia
Valori bassi [RIF.1]	Privi di significato clinico
Parametri correlati	VES, PCR, ferritina, aptoglobina, emocromo, anticorpi anti-nucleo, anticorpi anti-citrullina, anticorpi anti SSA e anti SSB
Per ulteriori informazioni	
Segreteria	Tel. 0471-908306
Riferimenti bibliografici	[RIF.1] Thomas L: Labor und Diagnose. Frankfurt 2012 (8 Auflage) [RIF.2] Bugiardino [RIF.3] World Health Organization, Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2 [RIF.4] Dati interni [RIF.5] Desirable Biological Variation Database specifications - Westgard [RIF.6] Il teorema di Bayes nella diagnostica di laboratorio-Appendice E-ver 1.0
Preparato il	30.03.2021
Prossima revisione prevista	30.03.2024