



Istruzioni per il prelievo del campione

Analisi: esami colturali (aerobi, ev. anaerobi e lieviti) su materiali dell'apparato genitorinario	<u>Tamponi</u>	<u>Sperma</u>
Ricerche (codice mnemonico): - Coltura apparato genitourinario (CGU) - Coltura gonococchi (CGONO)	- Aprire la busta contenente il kit eSwab (tampone e provetta) - Raccogliere tramite il tampone il materiale - Svitare il tappo del contenitore eSwab e inserire il tampone, con la porzione distale immersa nel liquido di trasporto - Spezzare l'applicatore a livello della linea colorata, facendo leva sull'orlo della provetta - Riavvitare bene fino in fondo il tappo sulla provetta. Scrivere sull'etichetta della provetta il nome del paziente	- Eseguire preferibilmente la raccolta al mattino - Effettuare un'accurata pulizia dei genitali esterni con acqua e sapone - Urinare fino allo svuotamento completo della vescica - Eiaculare nel contenitore sterile, raccogliendo tutto il materiale - Evitare contaminazioni del materiale e dell'interno del contenitore con le mani - Richiudere accuratamente il contenitore per prevenire la fuoriuscita del materiale <i>Per esecuzione dello spermogramma rivolgersi al Laboratorio di Patologia Clinica</i>
Sistema di raccolta/contenitore: eSwab (standard-tappo rosa e sottile-tappo arancio)		
Dove reperire il sistema di raccolta/contenitore: <u>Pazienti esterni:</u> Centri prelievo - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige <u>Reparti e ambulatori ospedalieri:</u> tappo rosa: 5118987 Cod. Magazzino; tappo arancione: 5024513 Cod. Magazzino, barattolo: 5060007	 IMPORTANTE: per il prelievo di materiale dell'apparato genitourinario per le altre ricerche (p.e. screening molecolari ecc.) utilizzare i contenitori specifici!	
Dove consegnare dopo la raccolta Se NON associata al prelievo ematico, la consegna è possibile solo presso LMV-BZ (Lab. di Microbiologia e Virologia di Bolzano) e presso LPC-BZ (Lab. di Patologia Clinica dell'Ospedale di Bolzano), secondo gli orari indicati nelle relative home page Laboratori Azienda Sanitaria (asdaa.it) . La prenotazione NON è necessaria. Quando: il prima possibile; nel caso si rendesse necessario, il campione può essere conservato in frigorifero per <u>non più di 24 ore</u> (non congelare!).		