

Istruzioni per il prelievo del campione

Analisi: **coltura per miceti dermatofiti**

Ricerche (codice mnemonico):

- Miceti dermatofiti (DERM)

Sistema di raccolta/contenitore:

- **eSwab tappo rosa (tampone standard)**
- **Barattolo sterile**



Dove reperire il sistema di raccolta/contenitore:

- Pazienti esterni: Centri prelievo - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
- Reparti e ambulatori ospedalieri: tappo **rosa**: Cod. Magazzino 5118987; barattolo sterile: Cod. Magazzino 506007

Dove consegnare dopo la raccolta: Se NON associata al prelievo ematico, la consegna è possibile solo presso LMV-BZ (Lab. di Microbiologia e Virologia di Bolzano) e presso LPC-BZ (Lab. di Patologia Clinica dell'Ospedale di Bolzano), secondo gli orari indicati nelle relative home page [Laboratori Azienda Sanitaria \(asdaa.it\)](#). La prenotazione NON è necessaria.

Quando: il prima possibile; nel caso si rendesse necessario, il campione può essere conservato in frigorifero per non più di 24 ore (non congelare!).


- *Unghie*: evitare di applicare smalti o pomate e non tagliare l'unghia nella settimana precedente l'esame
- *Cute/squame*: raccogliere le squame e non applicare medicinali nei giorni precedenti l'esame
- *Capelli*: strappare alcuni capelli (non tagliare)

Aprire la busta contenente il kit eSwab (tampone + provetta), prelevare il tampone ed eseguire il prelievo. Svitare il tappo **rosa** del contenitore eSwab ed inserire il tampone.

Spezzare l'applicatore nel punto indicato dalla linea colorata, facendo leva sull'orlo della provetta

Riavvitare bene fino in fondo il tappo sulla provetta.

Scrivere sull'etichetta della provetta il nome del paziente

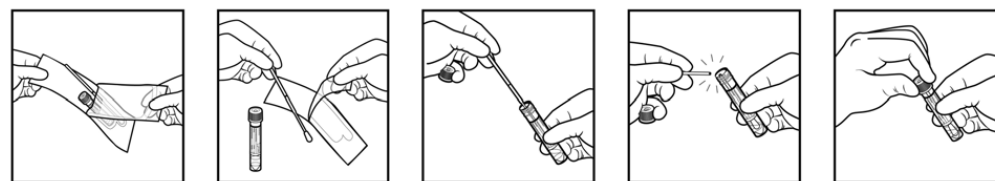

In alternativa introdurre il materiale nel barattolo sterile