

HIV capillus (virus da immunodeficienza umana di tipo 1 e 2) nel siero

Informazioni generali

Codice accettazione	110084
Indicazioni cliniche [RIF.1]	- Per dipendenti che denunciano un incidente con esposizione a materiale biologico - I dipendenti devono adottare il percorso indicato nel protocollo 1339/16 Rev. Nr. 05
Preparazione del paziente	NP
Richiedibile in urgenza (Valido solo per pazienti interni)	Si (richiedibile giornalmente dalle ore 0:00 alle ore 24:00)
Dove effettuare il prelievo	Il prelievo viene effettuato al paziente con il quale si è verificato il contatto con materiale biologico. Il prelievo deve essere eseguito in reparto secondo il protocollo 1339/16 Rev.Nr.05
Esecuzione	Giornaliera Secondo protocollo 1339/19 Rev.Nr.06
Tempo di refertazione	NP

Preanalitica

Tipo di campione	Siero
Tipo provetta	Tappo rosso con inserto giallo 3,5 ml
Trasporto del campione	A temperatura ambiente
Trattamento del campione in laboratorio	Centrifugare entro 2h a temperatura ambiente
Criteri per la non accettabilità del campione	Volume insufficiente, non corretta identificazione del paziente, mancato adempimento dei requisiti delle procedure
Stoccaggio del campione dopo l'analisi	7 giorni a 2-8°C
Possibilità di richiesta su campione già processato	A seconda della stabilità del campione per il periodo di stoccaggio

Indicazioni tecniche

Misurando	Anticorpi Anti HIV 1 / 2 nel siero		
Metodo [RIF.2]	Principio immunocromatografico		
Range di riferimento [RIF.2]	Negativo		
Stabilità del campione [RIF.2]	18-22°C: ND	2-8°C: 3gg	-20°C: ND
Tempo di emivita dell'analita [RIF.1,3]	ND		
Variabilità analitica (%) [RIF.4]	ND		
Variabilità biologica intraindividuale (%) [RIF.5]	ND		
Differenza critica (%) [RIF.6]	ND		

Incertezza di misura (U_m) omogeneo [RIF.4]	ND
Interferenze [RIF.2]	Vedi foglietto illustrativo
Significatività clinica	
Valori elevati [RIF.1]	Probabile positività per HIV; il test deve essere supportato da ulteriori metodi diagnostici
Valori bassi [RIF.1]	Infezione con HIV improbabile Attenzione: la negatività del test non esclude l'infezione, pertanto il test deve essere ripetuto ove necessario
Parametri correlati	Esami microbiologici per la conferma della diagnosi, conta dei linfociti CD4
Per ulteriori informazioni	
Segreteria	Tel. 0471-908306
Riferimenti bibliografici	[RIF.1] Thomas L: Labor und Diagnose. Frankfurt 2012 (8 Auflage) [RIF.2] Bugiardino [RIF.3] World Health Organization, Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2 [RIF.4] Dati interni [RIF.5] EFLM Biological Variation Database [RIF.6] Il teorema di Bayes nella diagnostica di laboratorio-Appendice E-ver 1.0
Preparato il	13.09.2021
Prossima revisione prevista	13.09.2024