

Calprotectin im Stuhl: Anweisungen für Probenvorbereitung

Calprotectina nelle feci: Istruzioni per la preparazione del campione

Componenti del CALEX® Cap

Fig. A
CALEX® Cap alla consegna


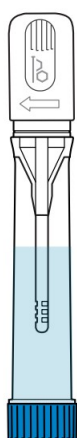


Fig. B
Tappo di campionamento



Fig. C
Corpo CALEX® Cap

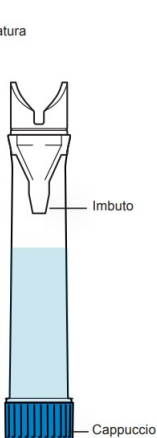

Bestandteile von CALEX® Cap

Abb. A
CALEX® Cap bei Lieferung

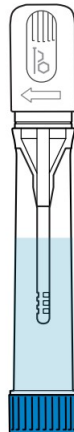


Abb. B
Dosierstab


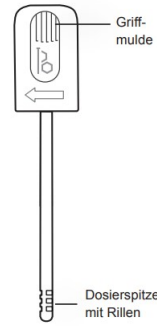


Abb. C
CALEX® Cap Basisröhrchen

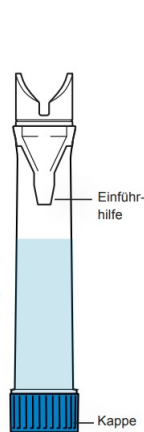


A. Tenere il dispositivo CALEX Cap in posizione verticale e rimuovere il tappo di campionamento **bianco** ruotando e tirandolo contemporaneamente verso l'alto.

Non svitare il cappuccio blu!


B. Immergere la punta di dosaggio con le scanalature nelle feci ruotandola e rimuovendola subito dopo. Ripetere la procedura in 3-5 diverse posizioni del campione per riempire completamente le scanalature.

C. Il tappo di campionamento deve essere introdotto nuovamente nel corpo del dispositivo CALEX Cap e inserito nella posizione di blocco finale. Si avvertono due scatti.


A

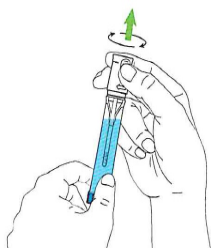

B

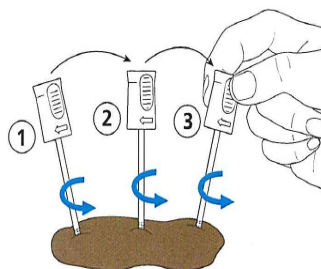

C

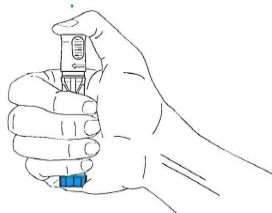

A. Halten Sie das CALEX Cap Röhrchen aufrecht und entnehmen Sie den **weißen** Dosierstab, indem Sie ihn gleichzeitig drehen und nach oben ziehen.

Die blaue Verschlusskappe nicht abschrauben!

B. Tauchen Sie die Dosierspitze mit den Rillen in die Stuhlprobe ein, drehen Sie sie darin und entfernen Sie sie gleich danach. Wiederholen Sie diese Schritte an 3 bis 5 verschiedenen Stellen der Stuhlprobe, um die Rillen komplett zu füllen.

C. Der Dosierstab wird anschließend über die Einführhilfe in das CALEX Cap Basisröhrchen gesteckt und in die finale Verschlussposition gedrückt. Sie spüren und hören zwei „Klicks“.