

Istruzioni per il prelievo del campione

Analisi: esami colturali (batteri aerobi, ev. anaerobi, lieviti e miceti) su secreti nasali, faringei, da ferite, cute (tappo viola), oculari, auricolari (tappo arancione).

Ricerche (codice mnemonico):

- Coltura per batteri e lieviti (31COLT)
- Coltura per anaerobi (31CAN)
- Screening multiresistenze (31MRSA, 31ESBL, 31VRE)
- Candida (31MIC)

Sistema di raccolta/contenitore:

- **Kit eSwab tappo viola (tampone standard) o eSwab Minitip tappo arancione (tampone sottile)**



Dove reperire il sistema di raccolta/contenitore:


- Pazienti esterni: Centri prelievo - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige,
- Reparti e ambulatori ospedalieri: tramite la farmacia ospedaliera

Dove consegnare dopo la raccolta: in qualsiasi Centro prelievo dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Per orari di apertura si veda sito <https://www.asdaa.it/it/distretti-sanitari.asp>

Quando: il prima possibile; nel caso si rendesse necessario, il campione può essere conservato in frigorifero per non più di 24 ore (non congelare!).

Nota: i tamponi (rosa e arancione) si differenziano per lo spessore del tampone di prelievo che risulta più adatto al distretto anatomico da campionare.

- Aprire la busta contenente il kit eSwab (tampone + provetta), prelevare il tampone ed eseguire il prelievo.
- Svitare il tappo **rosa** (o **arancione**) del contenitore eSwab ed inserire il tampone.
- Spezzare l'applicatore nel punto indicato dalla linea colorata, facendo leva sull'orlo della provetta
- Riavvitare bene fino in fondo il tappo sulla provetta.
- Scrivere sull'etichetta della provetta il nome del paziente

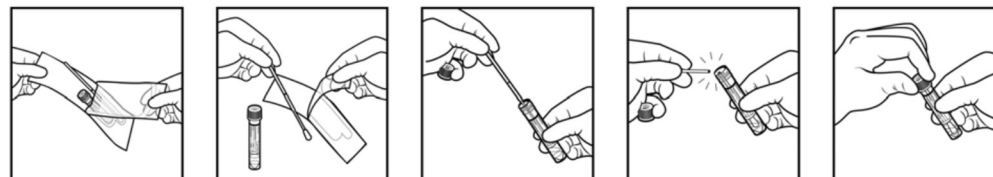

IMPORTANTE: per il prelievo di materiali per le altre ricerche (p.e. screening molecolari) utilizzare i contenitori specifici!