

Anweisungen für die Gewinnung des Probenmaterials


Analysen: Mikroskopischer Nachweis von Eiern von
Enterobius vermicularis (Oxyuren) – Klebestreifen (Scotch)-Test

Untersuchungen (Annahamekodex):

- Scotch-Test für den Nachweis von Oxyureneiern (SCOTCH)

Probenbehälter:

Kit für Probengewinnung :
Plastikbehälter + 3 Objektträger aus Glas

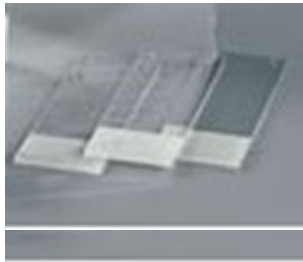

Wo man die Probenbehälter einholen kann:

- Externe Patienten: Blutabnahmestellen – Südtiroler Gesundheitsbetrieb
- Abteilungen und Ambulatorien im Krankenhaus: Magazinkodex 3005957

Wo man die Probenbehälter abgeben kann: Ist eine Probe NICHT mit Blutproben kombiniert, kann diese nur im LMV-BZ (Labor für Mikrobiologie und Virologie) oder im LPC-BZ (Zentrallabor für klinische Pathologie des Krankenhaus Bozen) in den, laut Homepage [Labore | Gesundheitsbetrieb \(sabes.it\)](http://labore.gesundheitsbetrieb.sabes.it) vorgegebenen Zeiten, abgegeben werden. Eine Vormerkung ist NICHT nötig!

Wann: Am dritten Tag muss der Behälter mit den drei Objektträgern bei der Blutabnahmestelle abgegeben werden.

- **Kit** für die Probenentnahme abholen
- Die Gewinnung des Materials vormittags vor dem Stuhlgang und vor dem Waschen durchführen.
- Am Vorabend keine Creme im Analbereich auftragen
- Mit der Schere ein Stück DURCHSICHTIGEN (nicht matten!) Klebestreifen abschneiden, welcher kürzer als die vom Labor zur Verfügung gestellten Objektträger ist.
- Hinweis: Einmalhandschuhe anziehen und sorgfältig die Hände waschen (die Wurmeier sind infektiös)
- Die Klebeschicht des Klebestreifens in der Analgegend an mehreren Stellen und mehrere Male anhaften (eventuell mit Hilfe des Stieles eines Löffels)
- Den Klebestreifen von der Perinalgegend abnehmen und mit der Klebeschicht zum Objektträger hin über die ganze Länge und möglichst faltenlos auf den Objektträger auftragen, ohne ihn mit Stuhl zu verunreinigen und ohne ihn seitlich aufzuwickeln.



- Am matten Rand des Objektträgers mit dem Bleistift den Namen des Patienten und das Datum auftragen.
- Den Objektträger wieder in den dafür vorgesehenen Behälter geben.
- Den Vorgang mit zwei weiteren Objektträgern jeweils am Morgen, vorzugsweise an darauffolgenden Tagen, wiederholen.