


Aandachtspunten bij gebruik bloedspotkaart:

- Het strookje niet afscheuren
- De kaart voor gebruik openvouwen.
- De rondjes op de kaart (de bloedspots) niet met uw vingers aanraken!
- De bloedspot moet gevuld worden met 1 flinke druppel bloed, dus niet meerdere druppels op een spot!
- De prikplaats op de huid licht afnemen met alcohol.
- De eerste druppel wegvegen
- De kaart tegen de druppel bloed aanhouden, niet tegen de huid en volledig laten volzuigen met bloed. U mag voorzichtig stuwen.
- De druppels op de kaart moeten minimaal 4 uur aan de lucht drogen voordat de kaart verstuurd mag worden
- De kaart op kamertemperatuur laten drogen op een gladde, schone en niet absorberende ondergrond. De kaart niet droogblazen met een föhn
- De kaart mag niet nat worden.




1. Bloedspotkaart met antwoordenvolop.

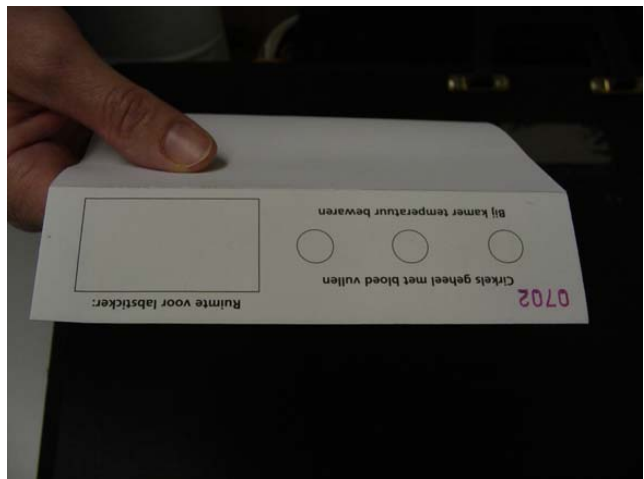


2. Het strookje onder aan de bloedspotkaart op deze manier openvouwen voor gebruik.




3. Na desinfecteren van de huid in de vinger of hiel pikken.

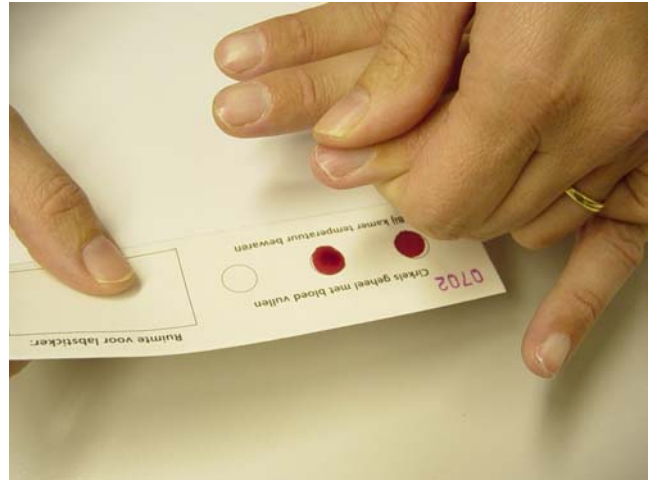

4. De bloedspots op de kaart vullen met één grote druppel bloed.

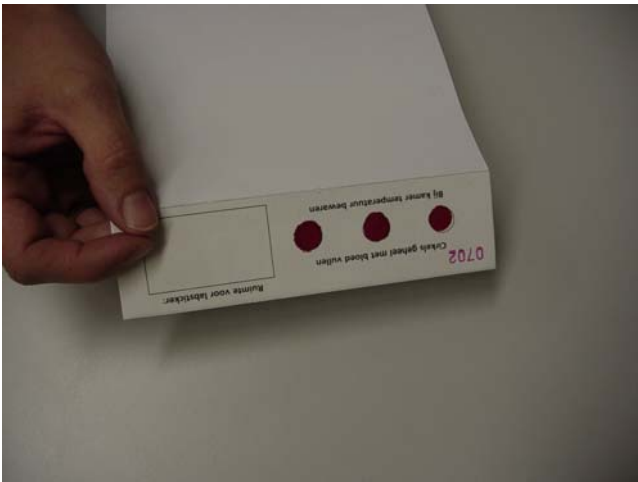

5. De druppels op de kaart minimaal vier uur aan de lucht laten drogen.

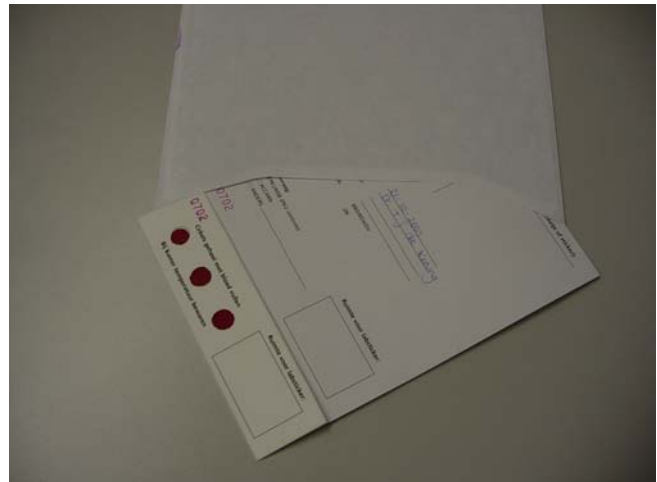

6. De bloedspotkaart in bijgeleverd plasticzakje versturen in de antwoordenvolp.