




UMC Utrecht



Introductie Sigma Transwab

Vanaf 11 oktober aanstaande gaat de onderafdeling Bacteriologie van de MMB over op het gebruik van de Sigma Transwab ter vervanging van de eerdere gebruikte watten. Z.o.z. voor afname instructie en bestelinformatie.

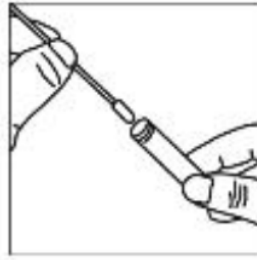

1. Open de verpakking tot halverwege en neem de buis uit de verpakking. Laat de wattenstok nog even in de verpakking.

2. Label de buis met de patiëntgegevens, draai de dop al een beetje los en plaats de buis op een vlakke ondergrond.

3. Neem de wattenstok uit de verpakking (raak de wat NIET met de handen aan) en gebruik deze om een monster te nemen.

4. Draai de buis open, steek de wattenstok in de buis en breek af op de breekrand.

5. Plaats de dop terug en draai totdat deze vastzit.

6. Lever de buis zo snel mogelijk in bij de MMB (loket 22). Indien niet mogelijk, bewaar de buis zolang bij 4°C.

Bestelinformatie: artikelnummer 5600121 of SAP nummer 3025882.