

INSTRUCTIE BAXJECT II

Wit -
poederflacon →


Doorzichtig -
waterflacon →



VOORBEREIDING

- Laat de flacons op kamertemperatuur komen (15-20°C).
- Was uw handen en trek evt. handschoenen aan.
- Verwijder de kapjes van de flacons.
- Desinfecteer de rubberen stoppen met een alcoholdoekje en laat ze drogen.

Stap 1 Bevestig de waterflacon

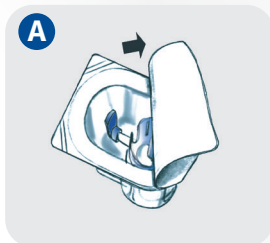

Open de BAXJECT II door de beschermfolie van de verpakking te verwijderen zonder de binnenzijde aan te raken.

- Verwijder het systeem **NIET** uit de verpakking.




Zet de injectieflacon met water op een vlakke ondergrond.

Draai de verpakking om en druk de BAXJECT II in één beweging over de injectieflacon met water.


De doorzichtige spike prikt nu door de rubberen stop van de injectieflacon heen.

Stap 2 Bevestig de poederflacon

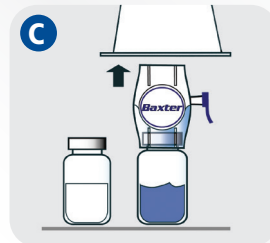

Verwijder de verpakking (zonder de BAXJECT II aan te raken) terwijl de BAXJECT II bevestigd blijft aan de waterflacon.

- Het blauwe beschermkapje **NIET** verwijderen.
- Raak de witte spike **NIET** aan.

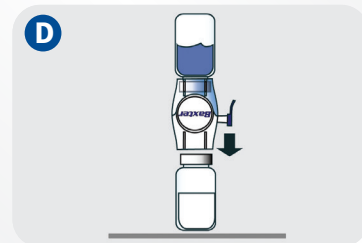


Zet de injectieflacon met poeder op een vlakke ondergrond. Draai het systeem om, zodat de injectieflacon met water zich aan de bovenzijde bevindt. Druk de witte zijde van de BAXJECT II loodrecht over de injectieflacon met poeder.

De witte spike prikt door de rubberen stop van de injectieflacon heen. Het water verplaatst zich nu naar de injectieflacon met poeder.

- Als het water zich juist verplaatst, ga door met stap E.
- Als het water zich niet juist verplaatst, volg de herstel instructies op de achterzijde.

N.B. Het is niet erg als een kleine hoeveelheid water achterblijft.


Stap 3 De oplossing optrekken

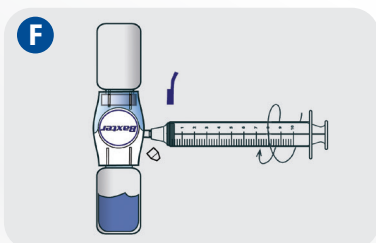

Zorg dat u een Luer-lock injectiespuit gebruikt. Verwijder het blauwe beschermkapje van het systeem. Verwijder het beschermkapje van de injectiespuit (indien aanwezig). Schroef de injectiespuit met volledig ingedrukte stamper op het systeem.


GEEN LUCHT INJECTEREN

Indien per ongeluk lucht in het systeem komt, ga naar **Scenario C** op de andere zijde.

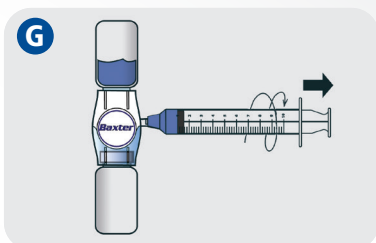

Draai het systeem om, zodat de injectieflacon met oplossing zich aan de bovenzijde bevindt. Trek de gehele hoeveelheid oplossing op in de injectiespuit door **LANGZAAM** de stamper uit te trekken.

Schroef de injectiespuit los. Als per ongeluk lucht in het systeem is gekomen, kan een aanzienlijk deel van de oplossing teruglopen in de injectieflacon. Indien dit gebeurt en niet de gehele oplossing opgetrokken kan worden, ga naar **Scenario C** op de andere zijde.

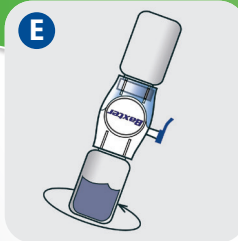

Zwenk het systeem enkele malen totdat het poeder volledig opgelost is.

- Niet schudden.

De BAXJECT II is bedoeld voor eenmalig gebruik. Bij het aanbreken van een nieuwe injectieflacon met poeder moet u daarom ook een nieuwe BAXJECT II gebruiken.

Als u een grotere hoeveelheid factor IX nodig hebt dan in één injectieflacon zit, ga dan als volgt te werk:

- Los de benodigde flacons op zoals beschreven staat in stappen A tot E. Gebruik bij elke injectieflacon altijd een nieuwe BAXJECT II.
- Gebruik één grote injectiespuit om de verschillende injectieflacons achtereenvolgens op te zuigen. Volg stappen F en G voor elke gemaakte oplossing.

Het gebruikte BAXJECT II systeem volgens uw lokale vereisten weggooien.

Gebruik de BAXJECT II niet als de verpakking niet meer steriel afgesloten is of als het tekenen vertoont van verval.

Raadpleeg altijd de bijsluiter alvorens een geneesmiddel toe te dienen. Afbeeldingen zijn artistieke weergaven.