

HERSTELINSTRUCTIE BAXJECT II

HERSTELINSTRUCTIE: ALS HET WATER ZICH NIET NAAR DE INJECTIEFLACON MET POEDER VERPLAATST.

- Zorg dat de injectieflacon met water zich aan de onderzijde bevindt.
- Kijk waar het **WITTE** en het **DOORZICHTIGE** deel van de BAXJECT II zit.
- Bepaal welke zijde van het systeem op de waterflacon aangesloten is.
 - ✓ Als de **WATER**flacon **CORRECT** aangesloten is op de **DOORZICHTIGE** zijde, ga naar **Scenario A**
 - ✗ Als de **WATER**flacon **INCORRECT** aangesloten is op de **WITTE** zijde, ga naar **Scenario B**


Wit - poederflacon →

Doorzichtig - waterflacon →




N.B. als het water niet correct doorstroomt, zou dat kunnen betekenen dat het vacuüm verbroken is, waardoor de steriliteit in gevaar kan komen. Als er bedenkingen zijn, neem dan contact op met uw arts of uw hemofilie behandelcentrum.


Scenario A

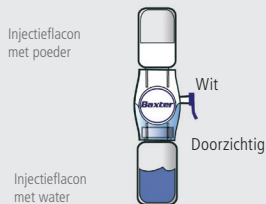


De waterflacon is **CORRECT** verbonden met de **DOORZICHTIGE** zijde van de BAXJECT II.

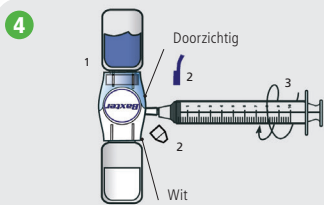


Draai het systeem om, zodat de flacon met water zich aan de bovenzijde bevindt. Zorg ervoor dat u een Luer-lock injectiespuit gebruikt. Verwijder het beschermkapje van de injectiespuit en het systeem. Verbind de spuit met het systeem.

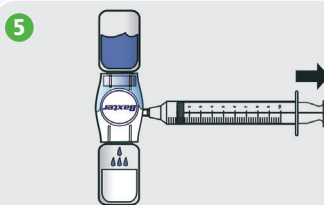


Trek langzaam aan de stamper om lucht uit de flacons te trekken (hierdoor zal het water in de poederflacon stromen).

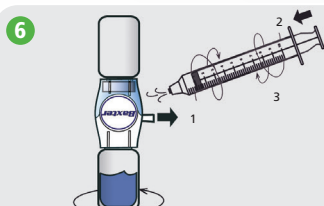


Verwijder de injectiespuit van de BAXJECT II. Duw de stamper volledig in om de lucht uit de spuit te verwijderen. Sluit de injectiespuit opnieuw aan. **GEEN LUCHT INJECTEREN**

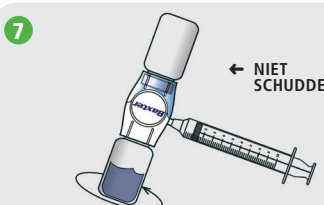


Zwenk voorzichtig tot het poeder volledig opgelost is.

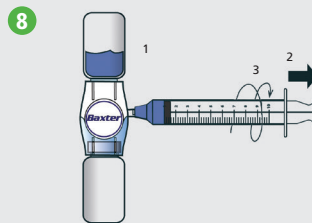


Draai het systeem om, zodat de flacon met oplossing zich aan de bovenzijde bevindt. Trek de gehele hoeveelheid oplossing op in de injectiespuit door de stamper **LANGZAAM** uit te trekken. Schroef de injectiespuit los.

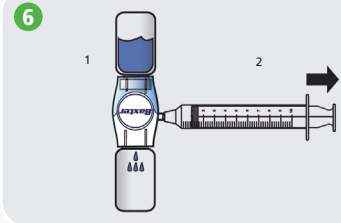

Draai het systeem om, zodat de flacon met oplossing zich aan de bovenzijde bevindt. Trek **LANGZAAM** aan de stamper om lucht uit de flacons te trekken (hierdoor zal de oplossing in de onderste flacon stromen).

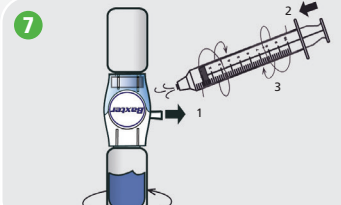


Verwijder de injectiespuit. Duw de stamper volledig in om lucht uit de spuit te verwijderen. Sluit de injectiespuit opnieuw aan. **GEEN LUCHT INJECTEREN**

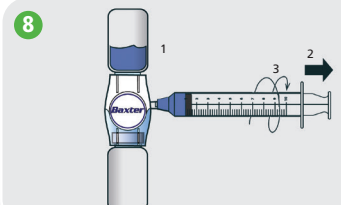


Draai het systeem om, zodat de flacon met oplossing zich aan de bovenzijde bevindt. Trek de gehele hoeveelheid oplossing op in de injectiespuit door de stamper **LANGZAAM** uit te trekken. Schroef de injectiespuit los.


Scenario B

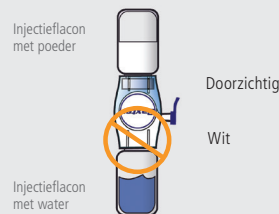

De waterflacon is **INCORRECT** verbonden met de **WITTE** zijde van de BAXJECT II.

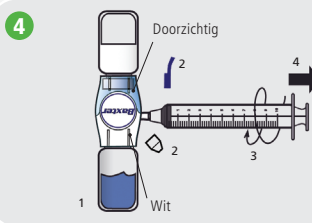

Houdt de waterflacon aan de onderzijde. Zorg ervoor dat er een Luer-lock injectiespuit gebruikt wordt. Verwijder de beschermkapjes van de injectiespuit en het systeem. Verbind de spuit met het systeem. Trek zachtjes aan de stamper om lucht uit de flacons te trekken.

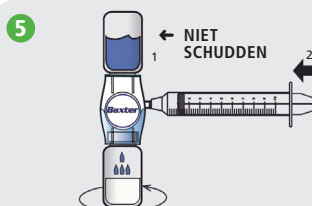

Draai het systeem om, zodat de flacon met water zich aan de bovenzijde bevindt. Duw de stamper **LANGZAAM** in om lucht in de flacons te spuiten (dit dwingt het water in de onderste flacon). Zwenk voorzichtig tot het poeder volledig opgelost is.

Scenario C

HERSTELINSTRUCTIE: ALS ER LUCHT IN HET SYSTEEM GEÏNJECTEERD IS EN NIET ALLE OPLOSSING OPGETROKKEN KAN WORDEN.

U hebt per ongeluk lucht in de flacons geïnjecteerd. Een aanzienlijke hoeveelheid oplossing is teruggelopen in de waterflacon.

- Draai het systeem om zodat de waterflacon zich aan de bovenzijde bevindt. Volg nu de stappen in **Scenario A**, beginnend met stap 5 en met weglating van stap 7.