

Overzicht onderhoud en vervangen disposables (beademingsmaterialen) CTB

	Materiaal	schoonmaken	Frequentie vervangen
Beademings slangen en toebehoren	Beademingsslang	z.n.	1x 6 maanden
	Beademingsslang verwarmd, (S9, Hybernite, MR 810, Hytrel	z.n. doorspoelen	Slang 1x 6 maanden Hybernite volledige set 1x per jaar
	F&P RT 102 150 cm verwarmd	Niet schoonmaken	1x 4 maanden
	Beademingsslang met expiratieklep	Niet schoonmaken	1x 4 maanden
	Losse connector met drukslang Elisée 150 of PLV-100, kortsluiting Trilogy	Niet schoonmaken	1x 12 maanden
	Overige losse connectoren	Zo nodig huishoudelijk, bij visuele verontreiniging	Z.n. 1x per 12 maanden
	Whisper Swivel	Zo nodig huishoudelijk, bij visuele verontreiniging	1x 12 maanden
	Zuurstof tussenstuk	Zo nodig huishoudelijk, bij visuele verontreiniging	1x 12 maanden
	Harmonicasslang/verbindingsslang (+ swivel), mount catheter	Bij visuele verontreiniging	1x maand of bij defect
	Bevochtigingspot-kamer	Dagelijks legen en laten drogen. 1x week reinigen, z.n. met schoonmaakazijn	Disposable: tegelijk met beademingsslangen Reusable: alleen indien defect
	Bevochtigingskamer MR290 (flotter)	niet	1x maand
	HME (=bevochtigingsfilter) beademingsmachine	Niet	Dagelijks
	Filter beademing (bij verneveling)	Niet schoonmaken	Dagelijks
	Spiro Fogless	Zo nodig huishoudelijk	Filter iedere dag
	T-stuk verneveling	Na ieder gebruik huishoudelijk	1x jaar

	Materiaal	schoonmaken	Frequentie vervangen
Maskers	Beademingsmasker	Dagelijks drogen en 1x week huishoudelijk reinigen	Max 2x jaar, vaker alleen in overleg met CTB
	Mondstuk los	Dagelijks reinigen	1x maand
	Kinband/hoofdband	Wasmachine	Indien defect

	Materiaal	schoonmaken	Frequentie vervangen
Filters beademingsapparaten	PLV	Grijs filter uitkloppen-spoelen	Vervanging bij service
	Vivo 4n en Vivo 50	Grijs foam filter: 1x p/week uitkloppen-spoelen	Wit filter 1x p/maand Grijs Foam filter 1x per jaar
	Trilogy 100	1x p 2 weken uitkloppen-spoelen	en 1 x jaar tijdens onderhoud.
	Stellar/ Astral	niet	1 x per 3 a 6 maanden
	Philips A40	Grijs Foam filter: 1xp 2 weken uitkloppen-spoelen	1 x 6 maanden
	Weinmann	Grof filter: 1x p/week uitkloppen-spoelen	1x 6 maanden Fijn filter vervangen na 1000 gebruiksuren
	Respironics ASV	Grijs Foam filter: f p 2weken uitkloppen-spoelen	1 x 6/maanden
	ResMed Aircurve 10 cs pacew	Niet	1x 6 maanden
	ResMed Autoset CS2	Niet	1x 6 maanden
	ResMed S9	Niet	1x 6 maanden
	ResMed Lumis 150	Niet	1x 6 maanden

	Materiaal	schoonmaken	Frequentie vervangen
Uitzuig materiaal	Serres zak uitzuigapparaat	Niet	Bij ¾ vol, minimaal 1x week
	Afzuigverbindingsslang	Na ieder gebruik doorspoelen met kraanwater	1x week
	Yankauer	Na ieder gebruik doorspoelen met kraanwater	3x week
	Filters uitzuigapparatuur	Niet	1x 6 maanden of bij niet goed functioneren
	Uitzuigpot zonder opvangzak	Dagelijks legen en reinigen	

	Materiaal	schoonmaken	Frequentie vervangen
Hoest ondersteuning	Slangen hoestmachine	Bij visuele verontreiniging of 1x per 2 weken	1x 6 maanden
	Masker hoestmachine	Na elk gebruik met warm water	Indien defect
	Bacteriefilter hoestmachine		1 x maand of bij visuele verontreiniging
	Machine filter hoestmachine	1x 2 weken uitkloppen-spoelen	1x 6 maanden
	Airstackballon	Zo nodig uitwendig	Indien defect, max 1x/jaar
	Airstackslang plus mondstuk	Dagelijks reinigen	Indien defect, 3x/jaar
	Airstack masker		Indien defect,
	Handbeademingsballon	Zo nodig uitwendig	Indien defect, max 1x per jaar

	Materiaal	schoonmaken	Frequentie vervangen
Tracheacanules en toebehoren	Canule zonder cuff	Schoonmaken	1x 28 dagen
	Canule met cuff	Niet	1x 28 dagen
	Binnencanule	Minimaal 2x daags reinigen	1x 28 dagen
	Bivona canule, zonder binnencanule	Max 10x reinigen in gekookt water, pediatrisch 5x	1x 28 dagen
	Custom Made canules	In overleg met eigen CTB	
	Zilveren canule	Binnencanule 2x daags reinigen, buitenanule 1x week reinigen	Alleen bij beschadiging
	Kunstneus/ bevochtigingsfilter op canule	Niet	Dagelijks
	Spreekklep in beademing	Zo nodig huishoudelijk	1x maand
	Spreekklep op canule	Zo nodig huishoudelijk	Bij defect vervangen
	Tracheacanulebandjes	Niet	Dagelijks
	Trachguard	Zo nodig huishoudelijk	Bij disfunctioneren of 1x maand

Algemene opmerkingen

Huishoudelijk schoonmaken houdt in: bij voorkeur met pH-neutraal schoonmaakmiddel, goed afspoelen en goed laten drogen.

Na luchtweginfectie **met** antibioticakuur en/of ziekenhuisopname langer dan 24 uur, altijd complete beademingset verschonen.

Beademingsmachine: wekelijks de buitenzijde schoonmaken met een vochtige doek.

Trolley: wekelijks schoonmaken met een vochtige doek.

Bij defect of disfunctioneren: vervang de complete beademingsset