


INSTRUCTIE BAXJECT III SYSTEEM

Dien de oplossing pas toe na instructies van uw arts of verpleegkundige.


GEBRUIKSINSTRUCTIE

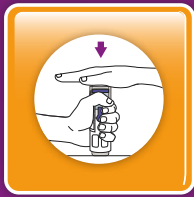


DRUK




ZWENK

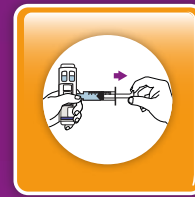


DRAAI OM & TREK OP

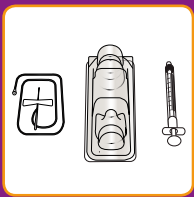


1 Leg alle voor de injectie benodigde materialen op een schoon, vlak oppervlak. Controleer de vervaldatum. Indien het product uit de koelkast komt, laat u het eerst op kamertemperatuur (15 °C - 25 °C) komen. Was uw handen grondig met warm water en zeep.

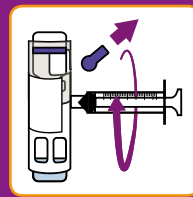


5 Verwijder het blauwe kapje van de BAXJECT III. Haal de injectiespuit uit de verpakking. Raak de tip van de spuit niet aan. Druk de stamper geheel in de spuit (om alle lucht te verwijderen) en schroef de spuit op de BAXJECT III. **Let op dat u geen lucht in het systeem injecteert.**

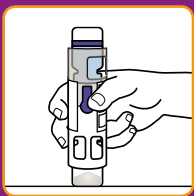


2 Open de verpakking door de seal te verwijderen. Haal de BAXJECT III uit de verpakking en zet deze rechtop op een vlak oppervlak, met de oplosvloeistof-flacon (flacon met blauwe streep) aan de bovenkant. Deze flacons met oplosvloeistof en poeder **NIET** van de witte plastic behuizing verwijderen. **Houd de BAXJECT III rechtop.**

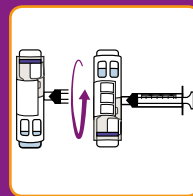

6 Draai de BAXJECT III om zodat de flacon met oplossing aan de bovenkant zit (**het blauwe streepje zit dan aan de onderkant**). Trek de gehele hoeveelheid oplossing op in de spuit door de stamper **langzaam** naar achteren te trekken. Stroomt de vloeistof niet in de spuit, controleer dan of beide flacons stevig in de behuizing gedrukt zijn.

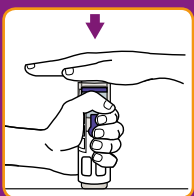

3 Houd de witte behuizing goed met één hand vast en **druk** met de andere hand **stevig** op de flacon met oplosvloeistof, zodat beide flacons in de behuizing worden gedrukt en de oplosvloeistof in de flacon met poeder stroomt. Controleer of alle oplosvloeistof **geheel** in de flacon met poeder is gestroomd. **Het blauwe kapje van de BAXJECT III NIET verwijderen tot stap 5.**

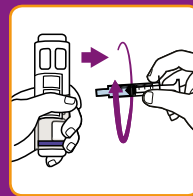

7 Draai de spuit los. Mogelijk blijft er een kleine hoeveelheid oplossing in de flacon achter. Verwijder eventuele lucht uit de spuit door de stamper langzaam iets in te drukken totdat er een druppel aan de tip verschijnt. U bent nu klaar om de oplossing toe te dienen met een snelheid die u als aangenam ervaart (maximaal 10 ml/minuut). De oplossing dient direct te worden gebruikt, en niet later dan 3 uur na het mengen.



4 Zwenk het systeem enkele malen totdat het poeder volledig is opgelost (niet schudden). Controleer de bereide oplossing vóór toediening op de aanwezigheid van deeltjes en verkleuringen. **De oplossing dient helder en kleurloos te zijn.** Is dit niet het geval, gebruik de oplossing dan niet en meld het aan uw zorgverlener.



8 Het gebruikte BAXJECT III systeem volgens uw lokale vereisten weggooien.

Niet schudden. Niet meer koelen na het mengen. De oplossing dient onmiddellijk te worden gebruikt (binnen drie uur na het mengen).


HERSTELINSTRUCTIE BAXJECT III

Mocht er tijdens het mengen (reconstitueren) iets niet goed zijn gegaan, volg dan nauwgezet onderstaande aanwijzingen voor herstel van de BAXJECT III met Factor VIII. Mogelijk moet u sommige stappen uit de mengprocedure herhalen.


Redenen waarom de oplosvloeistof niet (geheel) doorloopt:

- mogelijk heeft u willen mengen met de BAXJECT III op zijn kop (blauwe streepje aan de onderkant)
- mogelijk is het systeem gekanteld terwijl de vloeistof doorliep
- mogelijk is het blauwe dopje aan de zijkant van de BAXJECT III verwijderd vóór het mengen
- mogelijk heeft u per ongeluk lucht in het systeem geïnjecteerd
- mogelijk heeft u de flacons niet hard genoeg in de witte behuizing gedrukt

HERSTELPROCEDURE

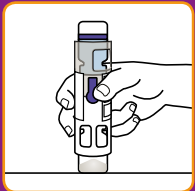

1 Zet de BAXJECT III neer met de flacon oplosvloeistof boven (deze flacon is herkenbaar aan de blauwe streep).

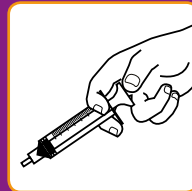


7 Schroef de spuit los. Druk de stamper nogmaals geheel in om alle lucht uit de spuit te verwijderen.




2 Zorg er voor dat **beide flacons stevig** in de witte behuizing zijn gedrukt.



8 Zwenk voorzichtig tot het poeder volledig is opgelost.

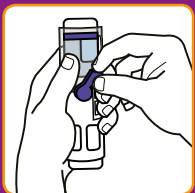


3 Verwijder het blauwe kapje dat zich aan de zijkant van het systeem bevindt.

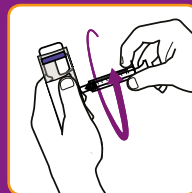


9 Schroef de spuit weer op het BAXJECT III systeem.




4 Druk de stamper van de spuit geheel in om eventuele lucht uit de spuit te verwijderen.

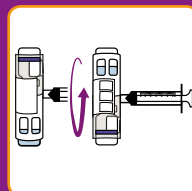


10 Draai het systeem om, zodat de flacon met oplossing boven zit (**blauwe streep aan de onderkant**).

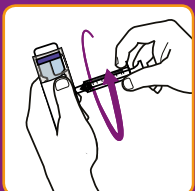


5 Schroef de spuit op het systeem. **Injecteer geen lucht.**

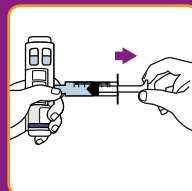

11 Trek de stamper langzaam terug om de oplossing in de spuit op te trekken. Het is mogelijk dat een kleine hoeveelheid oplossing in de flacon achterblijft.

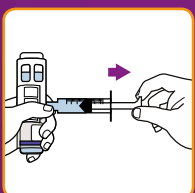

6 Trek langzaam aan de stamper om lucht uit de flacons te trekken. Hierdoor zal het water in de poederflacon stromen.

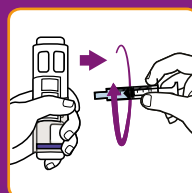

12 U bent nu klaar om de oplossing toe te dienen met een snelheid die u als aangenaam ervaart (maximaal 10 ml/minuut). De oplossing dient direct te worden gebruikt, en niet later dan 3 uur na reconstitutie.

Mochten deze stappen de eventuele problemen niet hebben opgelost, raadpleeg dan uw zorgverlener of uw hemofilie behandelcentrum.